

Bezpečnostní lanceta – Nová generace

Bezpečný a snadný odběr vzorku při vyšším komfortu pacienta



Bezpečná pro uživatele i pacienta

- Sterilní jehla nebo čepelka je bezpečně ukrytá v těle lancety před použitím i po něm, což brání riziku poranění
- Automatický uzamykací mechanismus brání opětovnému použití a křížové kontaminaci


Snadný odběr vzorku

- Připravená k okamžitému použití
- Zabezpečený aktivační knoflík brání náhodné aktivaci
- Tvarované tělo lancety zajišťuje bezpečné uchopení
- Malá kontaktní plocha pro maximální přesnost punkce

Komfort pacienta

- Hladké silikonizované čepelky a třikrát ostřené jehly pro minimalizaci bolesti
- Vymezené hloubky průniku pro optimální vzorkování u dospělých a dětí
- Kontrolovaná hloubka vpichu pro odstranění rizika poranění kosti

Bezpečnostní lanceta – Nová generace

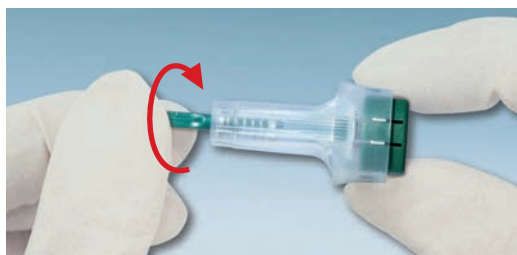

❶ Otočte víčkem, až se oddělí od bezpečnostní lancety.



❷ Bezpečnostní lancetu pevně přitiskněte na vybrané a očištěné místo vpichu a stiskněte aktivací knoflík.



❸ Zlikvidujte bezpečnostní lancetu v kontejneru na jehly.

Informace pro objednání

Obj. č.	Popis	Velikost	Hloubka vpichu	Balení
85.1015	Bezp. lanceta Mini	28 G	1,6 mm	200/vnitřní balení 1 200/karton
85.1016	Bezp. lanceta Normal	21 G	1,8 mm	200/vnitřní balení 1 200/karton
85.1017	Bezp. lanceta Extra	18 G	1,8 mm	200/vnitřní balení 1 200/karton
85.1018	Bezp. lanceta Super	Čepelka 1,5 mm	1,6 mm	200/vnitřní balení 1 200/karton
85.1019 (Na dětské paty)	Bezp. lanceta Neonatal	Čepelka 1,5 mm	1,2 mm	200/vnitřní balení 1 200/karton

Tento sortiment doplňují zkumavky pro kapilární odběry krve Microvette®



Microvette® 100/200
Odběr krve s kapilárou
na principu „End-to-end“



Microvette® 300/500
Odběr krve pomocí
lemu nádobky

Další informace jsou k dispozici na požádání.

SARSTEDT spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9
Tel. (00420) 281 021 491
Fax (00420) 281 021 495
info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com