


Mode d'emploi important

Monovette® Gaz du Sang


1

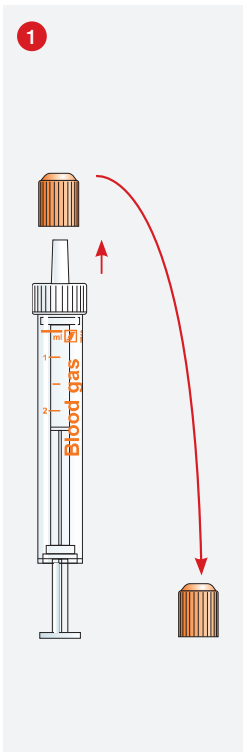

Enlever le bouchon orange de la Monovette® Gaz du Sang.


Prélèvement sanguin avec une Aiguille de Sécurité ou une Epicrânienne de Sécurité

2

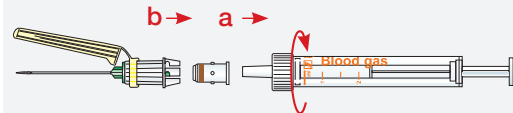

Fixer l'adaptateur membrane (Ref. 14.1112) au cône Luer de la Monovette® Gaz du Sang (a) et connecter là à l'Aiguille de Sécurité (b) ou à l'Epicrânienne de Sécurité.


3

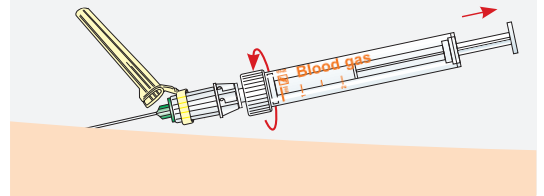

Prélever le sang selon votre procédure habituelle.


Prélèvement sanguin sur un cathéter à demeure

2

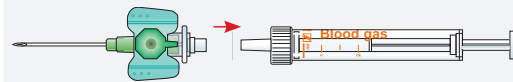

Connecter la Monovette® Gaz du Sang avec le cathéter.


3

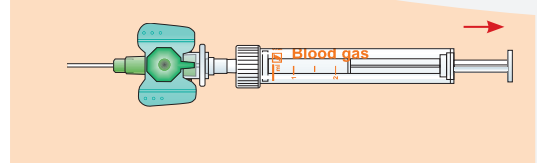

Prélever le sang lentement en tirant le piston et selon votre procédure habituelle.

Manipulation de l'échantillon


4

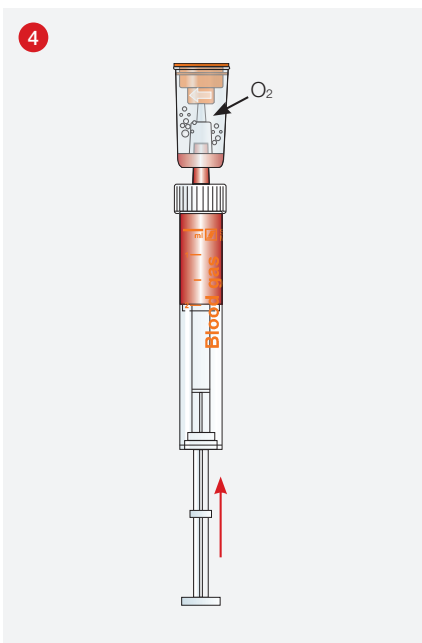

IMPORTANT!


Pour éviter de faux résultats dus à une contamination par l'air, il est possible de purger l'air en utilisant notre évent (Ref. 14.1148) et en poussant doucement le piston vers le haut.

5

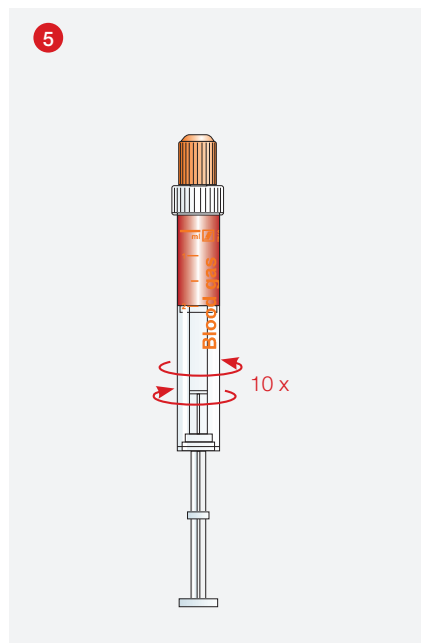

Mélanger le sang immédiatement après le prélèvement en roulant la Monovette® Gaz du Sang entre les paumes de mains.

6

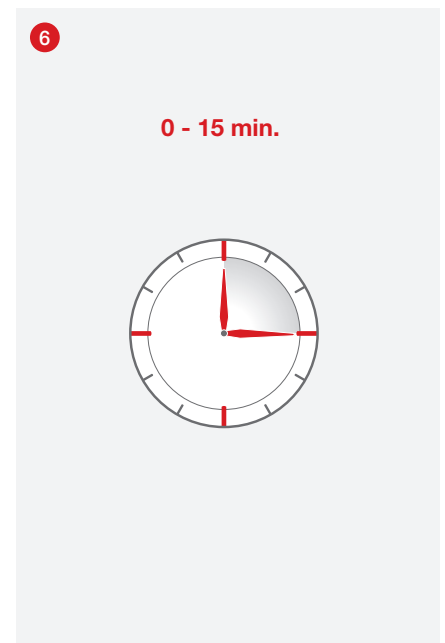

Pour de meilleurs résultats, les analyses des Gaz du Sang doivent être réalisées immédiatement ou au maximum 15 minutes après le prélèvement.