

S-Monovette®

Blutentnahmereihenfolge

Empfohlene Entnahmereihenfolge

Nach Gurr¹:

Blutkultur



Serum- / Serum-Gel Blut



Citrat Blut



Heparin- / Heparin-Gel Blut



EDTA Blut



Fluorid- / Citrat-Fluorid Blut

Nach CLSI²:

Blutkultur



Citrat Blut



Serum- / Serum-Gel Blut



Heparin- / Heparin-Gel Blut



EDTA Blut



Fluorid- / Citrat-Fluorid Blut

Technische Änderungen vorbehalten

Diese Publikation kann Informationen zu Produkten enthalten, die evtl. nicht in jedem Land verfügbar sind

¹ Gurr et al "Musterstandardarbeitsanweisung Präanalytik" J Lab Med 2011

² CLSI Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture, Approved Standard, 6th edition GP 41-A6 (former H3-A6), 27 (26) 2012

ANMERKUNG

Soll zuerst ein Citrat-Röhrchen abgenommen werden, wird vorab die Entnahme eines Leerröhrchens empfohlen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Informationen lediglich eine Empfehlung sind, es bleibt Ihrer eigenen Entscheidung überlassen, welcher Empfehlung bezüglich der Entnahmereihenfolge Sie sich anschließen wollen.

SARSTEDT AG & Co.
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon +49 22 93 305-0
Telefax +49 22 93 305-3450
☎ Service 0800 (Deutschland)
Telefon (0800) 0 83 305-0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com