

# Minivette® POCT


NOUVEAU!

Prélèvement et distribution de petits échantillons sanguins pour tests au point d'intervention




## Minivette® POCT


- Restitution facile de l'échantillon grâce aux fonctionnalités optimales du tube capillaire
- Distribution précise de faibles volumes de sang total
- Empêche toute fuite accidentelle lors du transfert sur le support d'analyse
- Volumes disponibles: 10 µl, 20 µl, 50 µl, 100 µl et 200 µl
- Préparations: Neutre, Héparine et EDTA

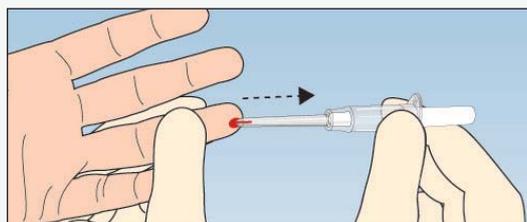


**1** Tenir la Minivette® POCT de chaque côté sous les ailettes, en position horizontale légèrement inclinée. Veiller à ne pas obturer l'orifice de ventilation à l'extrémité du piston et à ne pas appuyer sur le piston. Collecter les gouttes de sang à l'aide de la pointe capillaire en veillant à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air.

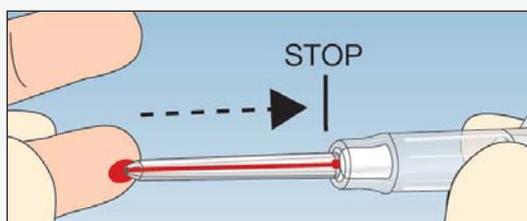

**2** Le prélèvement est terminé dès que le sang atteint le filtre blanc à l'autre extrémité de la pointe capillaire.

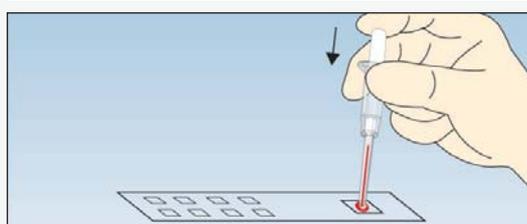

**3a** Placer la pointe du capillaire sur le support d'analyse et appuyer sur le piston pour distribuer l'échantillon de sang total.

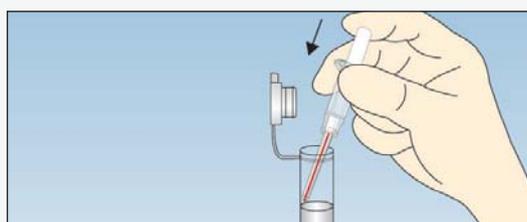

**3b** Il est également possible de déverser l'échantillon dans un microtube.

Tous les échantillons sanguins des patients doivent être traités comme potentiellement dangereux. Le port de gants s'impose!

## Références pour commande

Art. n°	Description	Code couleur	Conditionnement
17.2111.010	Minivette® POCT 10 µl neutre	blanc	200 pièces/boîte 2.000 pièces/carton
17.2111.020	Minivette® POCT 20 µl neutre	blanc	
17.2111.050	Minivette® POCT 50 µl neutre	blanc	
17.2111.100	Minivette® POCT 100 µl neutre	blanc	
17.2111.200	Minivette® POCT 200 µl neutre	blanc	
17.2112.020	Minivette® POCT 20 µl Héparine de Lithium	orange	200 pièces/boîte 2.000 pièces/carton
17.2112.120	Minivette® POCT 20 µl Héparine de Lithium	vert	
17.2112.050	Minivette® POCT 50 µl Héparine de Lithium	orange	
17.2112.150	Minivette® POCT 50 µl Héparine de Lithium	vert	
17.2112.100	Minivette® POCT 100 µl Héparine de Lithium	orange	
17.2112.101	Minivette® POCT 100 µl Héparine de Lithium	vert	150 pièces/boîte 1.500 pièces/carton
17.2112.200	Minivette® POCT 200 µl Héparine de Lithium	orange	
17.2112.201	Minivette® POCT 200 µl Héparine de Lithium	vert	200 pièces/boîte 2.000 pièces/carton
17.2113.020	Minivette® POCT 20 µl EDTA	rouge	
17.2113.120	Minivette® POCT 20 µl EDTA	violet	200 pièces/boîte 2.000 pièces/carton
17.2113.050	Minivette® POCT 50 µl EDTA	rouge	
17.2113.150	Minivette® POCT 50 µl EDTA	violet	200 pièces/boîte 2.000 pièces/carton

SARSTEDT France  
Route de Gray  
Z.I. des Plantés  
70150 Marnay  
Tél.: 03 84 31 95 95  
Fax: 03 84 31 95 99  
info.fr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com