


Minivette® POCT

Raccolta e dispensazione di piccole quantità di sangue per i test point-of-care



Minivette® POCT

- Facile raccolta grazie alle ottimali caratteristiche del capillare
- Precisa dispensazione di piccoli volumi di sangue
- Nessun gocciolamento durante il trasferimento sulla scheda del test
- Disponibile nei volumi da 10 µl, 20 µl, 50 µl, 100 µl e da 200 µl
- Preparazioni: Neutro, Eparina ed EDTA

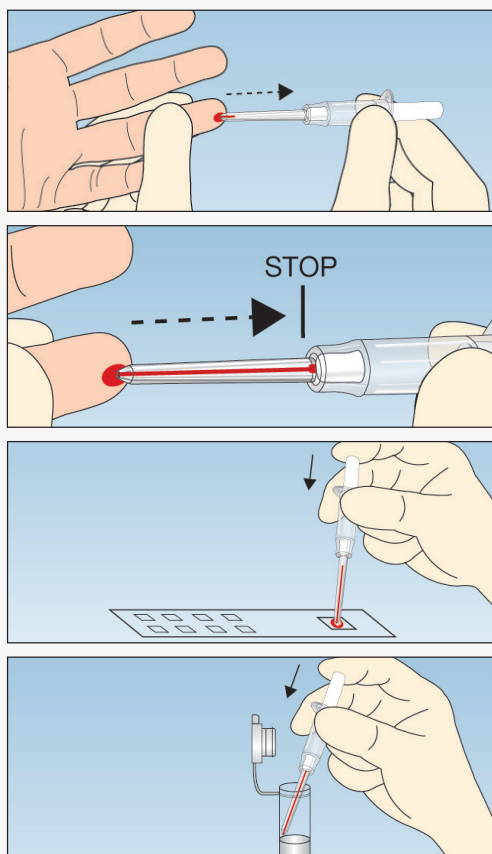

1 Tenere la Minivette® POCT in posizione orizzontale, leggermente inclinata, da sotto le estremità laterali. Il foro per il passaggio dell'aria alla fine dello stantuffo non va coperto, né lo stantuffo va premuto verso il basso. Raccogliere le gocce di sangue usando la punta capillare assicurando che non ci sia la presenza di bolle d'aria.

2 La raccolta è completata quando il sangue ha raggiunto il filtro all'altra estremità del capillare.

3a Posizionare il capillare sul campo del test e premere leggermente verso il basso lo stantuffo per dispensare l'intero campione di sangue.

3b In alternativa, dispensare il campione in una microprovetta.

Tutti i campioni di sangue devono essere trattati come potenzialmente infetti. Indossare i guanti!

Informazioni per l'ordine

Cod. articolo	Descrizione	Codice colore	Confezione
NUOVO 17.2111.920	Minivette® POCT con tappo 20 µl neutro	bianco	confezione singolar 100 pz/scatola interna / 1.000 pz/scatola
17.2111.010	Minivette® POCT 10 µl neutro	bianco	200 pz/scatola interna / 2.000 pz/scatola
17.2111.020	Minivette® POCT 20 µl neutro	bianco	
17.2111.050	Minivette® POCT 50 µl neutro	bianco	
17.2111.100	Minivette® POCT 100 µl neutro	bianco	
17.2111.200	Minivette® POCT 200 µl neutro	bianco	150 pz/scatola interna / 1.500 pz/scatola
17.2112.020	Minivette® POCT 20 µl Litio-Eparina	arancio	200 pz/scatola interna / 2.000 pz/scatola
17.2112.120	Minivette® POCT 20 µl Litio-Eparina	verde	
17.2112.050	Minivette® POCT 50 µl Litio-Eparina	arancio	
17.2112.150	Minivette® POCT 50 µl Litio-Eparina	verde	
17.2112.100	Minivette® POCT 100 µl Litio-Eparina	arancio	
17.2112.101	Minivette® POCT 100 µl Litio-Eparina	verde	
17.2112.200	Minivette® POCT 200 µl Litio-Eparina	arancio	150 pz/scatola interna / 1.500 pz/scatola
17.2112.201	Minivette® POCT 200 µl Litio-Eparina	verde	
17.2113.020	Minivette® POCT 20 µl EDTA	rosso	200 pz/scatola interna / 2.000 pz/scatola
17.2113.120	Minivette® POCT 20 µl EDTA	violetto	
17.2113.050	Minivette® POCT 50 µl EDTA	rosso	
17.2113.150	Minivette® POCT 50 µl EDTA	violetto	
17.2113.101	Minivette® POCT 100 µl EDTA	violetto	
17.2113.201	Minivette® POCT 200 µl EDTA	violetto	

SARSTEDT S.r.l.
Via della Siderurgia, 12
37139 Verona - ZA1 2
Tel. 045 8510114
Fax 045 8510118
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com