



Aiguille de Sécurité

Mode d'emploi

Avant le prélèvement sanguin

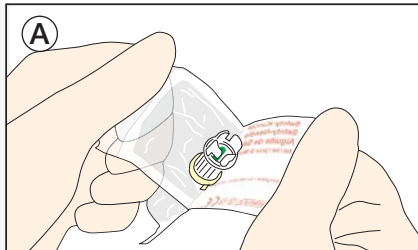


Ouvrir l'emballage pelable avec le pouce et l'index.

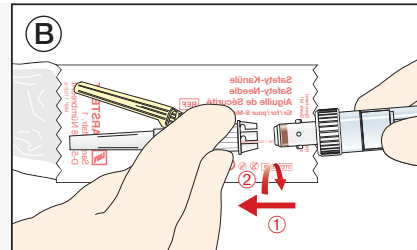


Connecter le tube S-Monovette® sur l'adaptateur de l'aiguille de sécurité.

OU

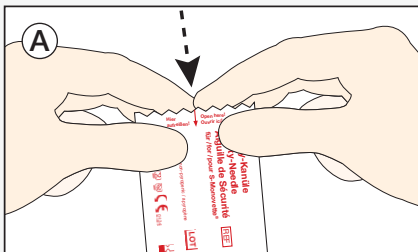


Déchirer l'emballage le long de la flèche.

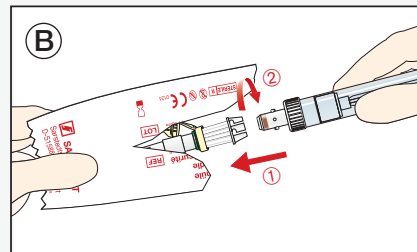


Connecter le tube S-Monovette® sur l'adaptateur de l'aiguille de sécurité.

Après le prélèvement sanguin

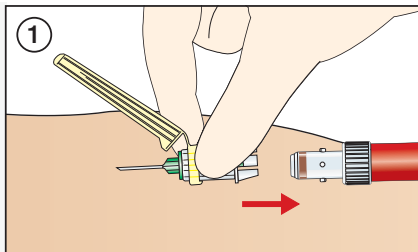


Déconnecter le dernier tube S-Monovette® de l'aiguille de sécurité et retirer ensuite cette dernière de la veine.


Comment activer le dispositif de sécurité de l'aiguille...

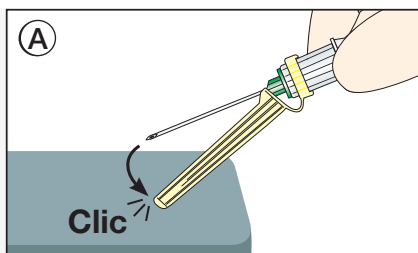

Placer le protecteur d'aiguille sur une surface stable et activer le en appuyant pour le verrouiller.

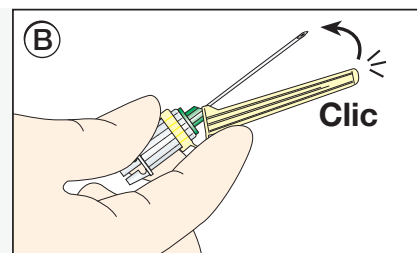

Il est également possible d'activer le dispositif de sécurité en appuyant avec l'index sur l'extrémité inférieure du protecteur

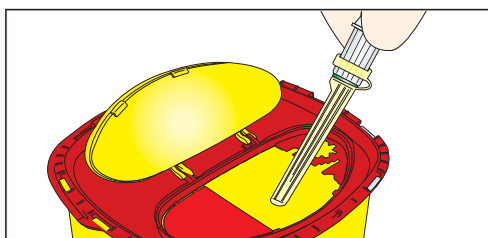


Après avoir activé le dispositif de sécurité, jeter l'aiguille protégée dans un container à déchets pour piquants / tranchants.


Aiguille de Sécurité Multifly®

Mode d'emploi

Avant le prélèvement sanguin

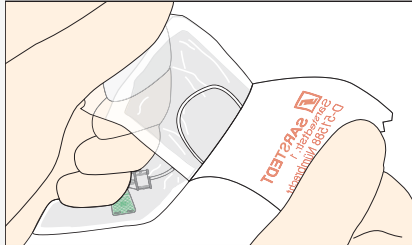


Ouvrir l'emballage pelable avec le pouce et l'index.

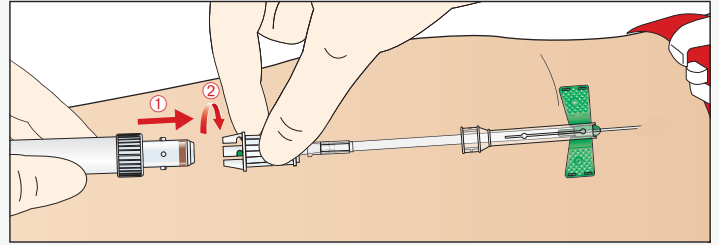

Connecter le tube S-Monovette® sur l'adaptateur de l'aiguille de sécurité Multifly®.


Après le prélèvement sanguin

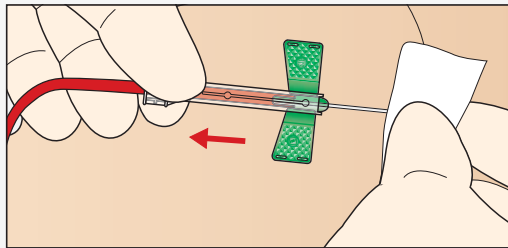


Saisir l'extrémité inférieure du protecteur d'aiguille entre le pouce et l'index avant de retirer l'aiguille Safety Multifly® de la veine.

Comment activer le dispositif de sécurité de l'aiguille....


...pendant que l'aiguille est toujours dans la veine ...après que l'aiguille ait été retirée de la veine

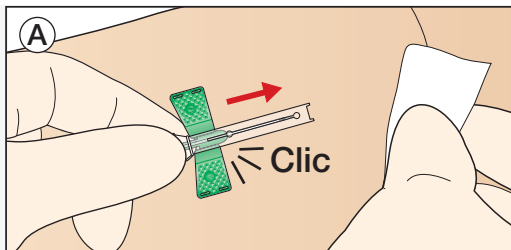

Faire glisser le protecteur d'aiguille vers l'avant tout en retirant l'aiguille Safety Multifly® de la veine.

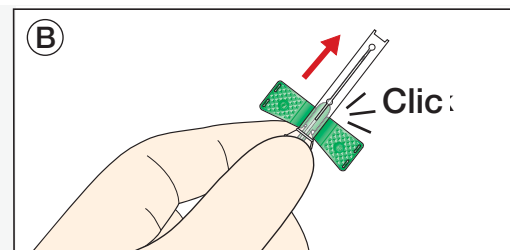

Retirer l'aiguille Safety Multifly® de la veine et ensuite, faire glisser le protecteur d'aiguille vers l'avant.

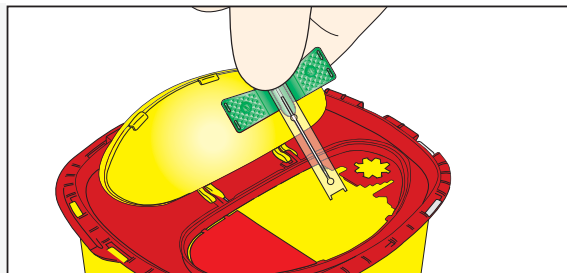

Après avoir activé le dispositif de sécurité, jeter l'aiguille Multifly® protégée dans un container à déchets pour piquants / tranchants.

SARSTEDT S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**