



Ago Safety

Istruzioni d'uso

Prima del prelievo

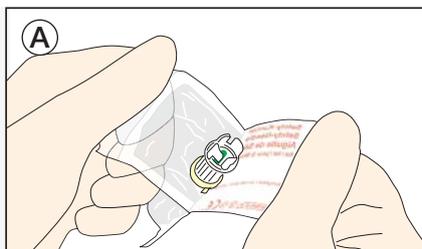


La confezione può essere aperta con il pollice e l'indice grazie alla tecnica peel-off.

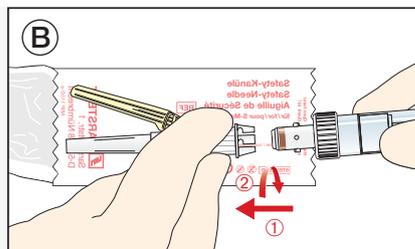


Collegare la S-Monovette® alla camicia dell'ago Safety.

OPPURE

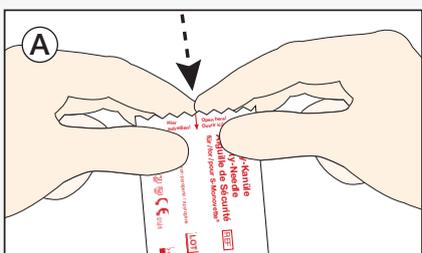


Strappare la confezione lungo la freccia centrale.

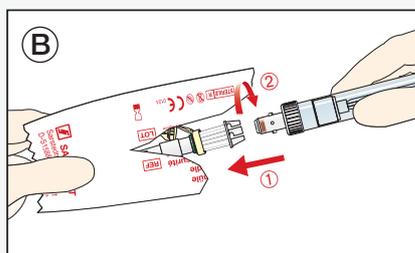


Collegare la S-Monovette® alla camicia dell'ago Safety.

Dopo il prelievo

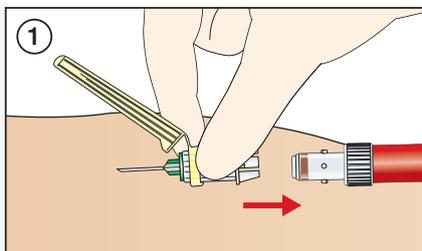


Staccare l'ultima S-Monovette® dall'ago Safety, quindi sfilare l'ago Safety dalla vena.


Attivazione della protezione dell'ago...

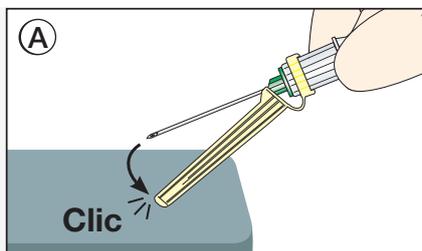

Collocare la protezione dell'ago su una superficie stabile e attivarla.

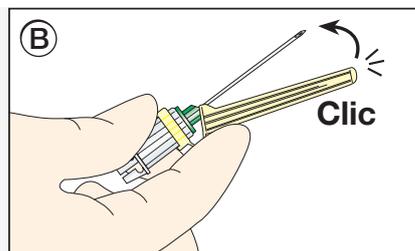

In alternativa, attivare la protezione dell'ago con l'indice sull'estremità inferiore.

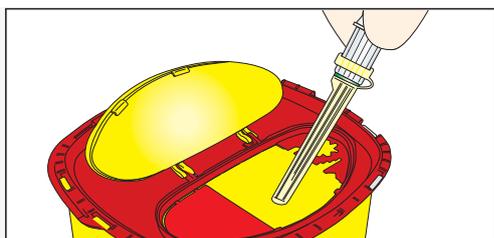


Dopo l'attivazione della protezione, smaltire l'ago Safety così protetto in un apposito contenitore.


Cannula Safety Multifly®

Istruzioni d'uso

Prima del prelievo

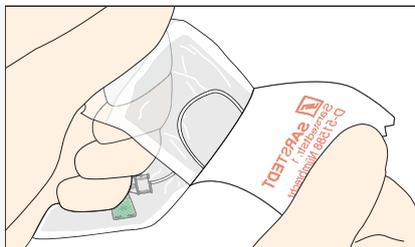


La confezione può essere aperta con il pollice e l'indice grazie alla tecnica peel-off.

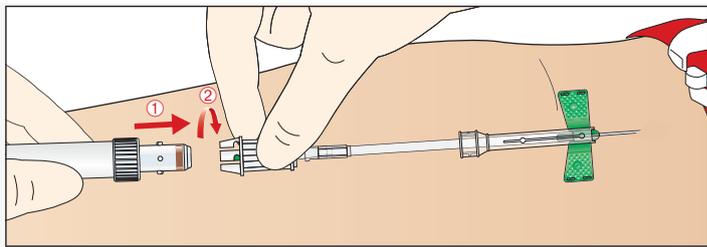

Collegare la S-Monovette® alla camicia dell'ago Safety-Multifly®.


Dopo il prelievo

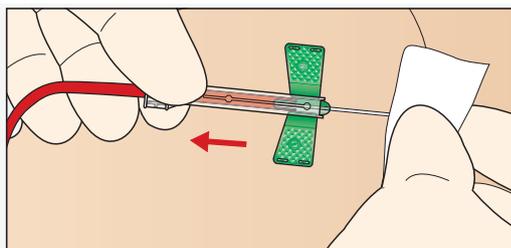

Afferrare la protezione dell'ago in alto e in basso sull'estremità inferiore con il pollice e l'indice e sfilare l'ago Safety-Multifly® dalla vena.


Attivazione della protezione dell'ago...

...in vena

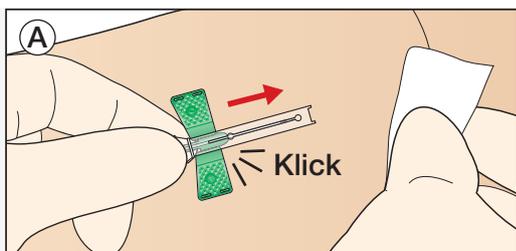


Attivare la protezione mentre si sfila l'ago Safety-Multifly® dalla vena.

...fuori vena

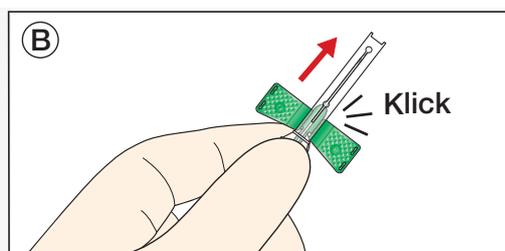

Sfilare l'ago Safety-Multifly® dalla vena e attivare la protezione.

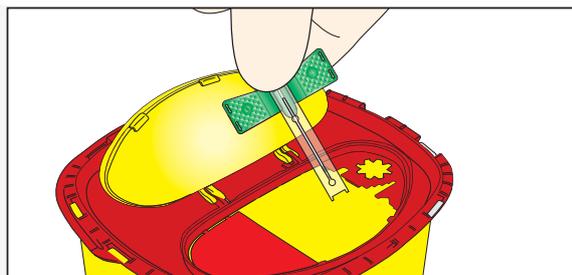

Dopo l'attivazione della protezione, smaltire l'ago Safety-Multifly® così protetto in un apposito contenitore.

SARSTEDT S.r.l.
Via della Siderurgia, 12
37139 Verona
Tel: +39 045 8510 114
Fax: +39 045 8510 118
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com