

# Micro-agulha


Características ideais de fluxo e manuseio




## Micro-agulha

- Desperdício de sangue mínimo sem perda de volumes residuais no adaptador
- Pega estriada para controle ideal da agulha
- Possibilidade de rotação a 360° para veias frágeis
- Fluxo de sangue ideal devido à excepcional qualidade da agulha e saída sem obstrução



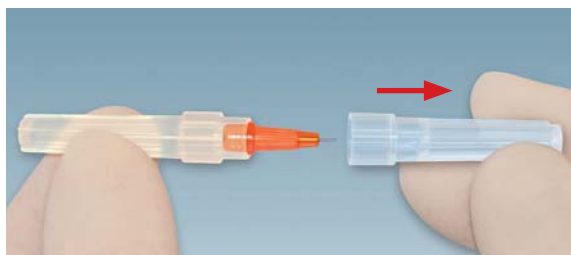

1 Remover a tampa.

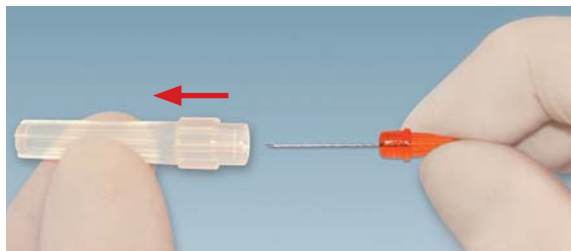

2 Remover a Micro-agulha da proteção.



3 Fazer a punção venosa e permitir que o sangue flua para um microtubo adequado.



4 Descartar a Micro-agulha num descartador perfuro-cortante apropriado.

## Informações para pedidos

Código	Descrição	Ø/Comprimento	Embalagem
85.921	Micro-agulha 21G x 3/4", verde	0,8 mm / 36 mm	50/caixa interna, 500/caixa externa
85.923	Micro-agulha 23G x 3/4", azul	0,6 mm / 36 mm	50/caixa interna, 500/caixa externa
85.925	Micro-agulha 25G x 3/4", laranja	0,5 mm / 36 mm	50/caixa interna, 500/caixa externa

Sarstedt LTDA  
Alameda Ásia, 144  
Polo Empresarial Tamboré  
CEP 06543-312  
Santana de Parnaíba - SP  
Tel: +55 11 4152 2233  
Fax: +55 11 4152 3198  
info.br@sarstedt.com  
www.sarstedt.com