


Odběr krve pomocí S-Monovette®

Cesta ke kvalitnímu výsledku

1 Příprava

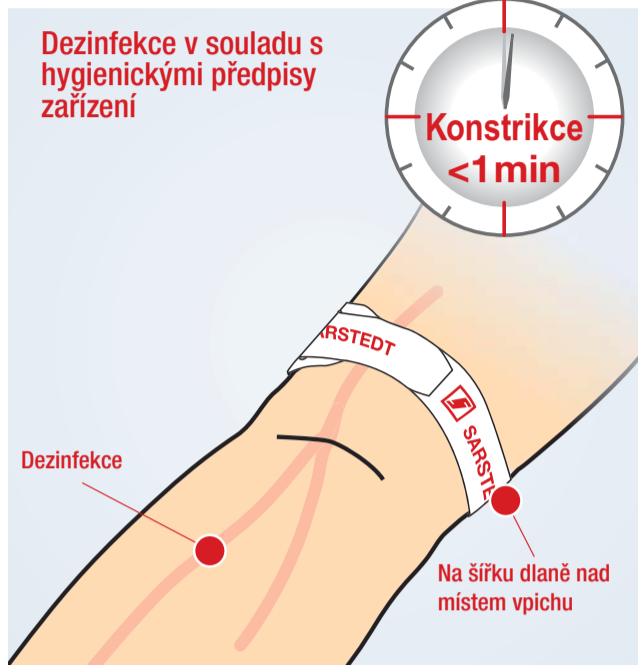


Doporučené pořadí při odběru

Podle Gurra ¹ :	Podle CLSI ² :
Hemokultura	Hemokultura
Sérová/sérum-gelová krev	Citrátová krev
Citrátová krev	Sérová/sérum-gelová krev
Heparinová/heparin-gelová krev	Heparinová/heparin-gelová krev
EDTA krev	EDTA krev
Fluoridová/citrát-fluoridová krev (S-Monovette® GlucoEXACT)	Fluoridová/citrát-fluoridová krev (S-Monovette® GlucoEXACT)

¹ Gurr et al "Musterstandardarbeitsanweisung Präanalytik" J Lab Med 2011
² CLSI GP41 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture, Approved Guideline


2 Odběr krve

Aspirační technika – Šetrný odběr krve

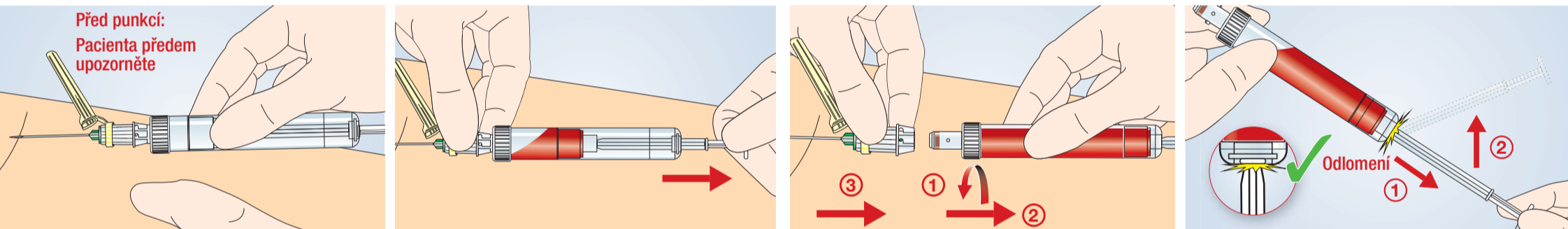

Vakuová technika³ – Odběr krve s přednastaveným vakuem

V zásadě společnost SARSTEDT doporučuje provést první odběr do zkumavky S-Monovette® aspirační technikou, protože je to šetrný způsob zahájení.

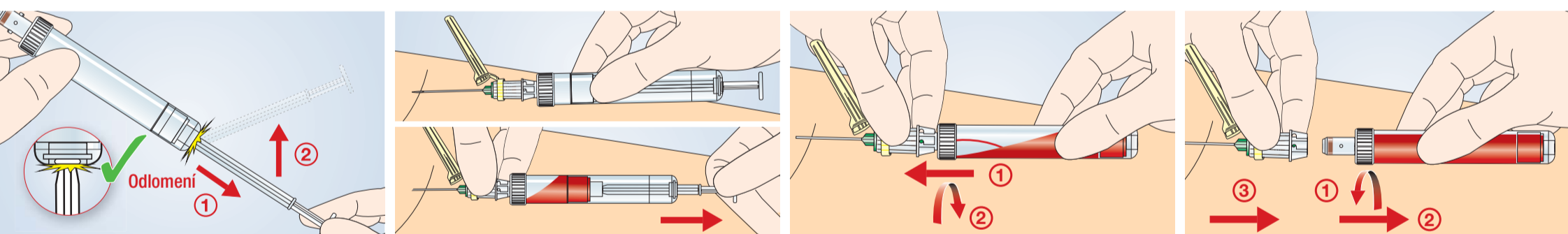

3 Manipulace se vzorky a likvidace

SPRÁVNÉ naplnění pro správné výsledky



Několikrát otočte dnem vzhůru

citrát, CTAD, PFA

BSG

heparin

EDTA, ThromboExact

fluorid

citrát fluorid (S-Monovette® GlucoEXACT)

CPDA₁




Zajistěte náležitě uložení a přepravu

Po odběru krve: Zkumavku S-Monovette® sérum/sérum-gel nechte 30 min. stát ve svislé poloze a v této poloze také přepravujte



Aktivace jednou rukou

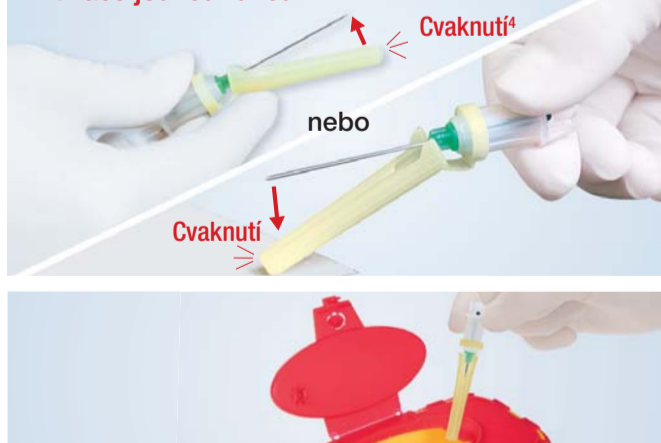

Rádi bychom vás upozornili na to, že témata zde zpracovaná („Odběr krve pomocí S-Monovette®“) mají pouze doporučující charakter a v žádném případě nenahrazují lékařská, vědecká nebo technická zařízení.

³ Pokud se má nejprve nabírat zkumavka s citrátem, doporučujeme předtím provést odběr do prázdné zkumavky. V zásadě společnost SARSTEDT doporučuje provést první odběr do zkumavky S-Monovette® aspirační technikou, protože je to šetrný způsob zahájení. Poté lze pokračovat v odběru vakuovou technikou.
⁴ Ochranný kryt jehly můžete aktivovat také ukazováčkem. Pro bezpečnou funkci dbejte na to, aby aktivace probíhala na spodním konci krytu.