

Garrot à usage unique

NOUVEAU



La solution hygiénique pour augmenter la Sécurité

- Réduit le risque de contamination
- Utilisation aisée
- Ne pince pas la peau – Sans douleur (même si le bras n'est pas rasé)

Consigne de pose du garrot à usage unique


Standard hygiénique optimal

Les garrots à usage unique réduisent les risques d'infections croisées et l'apparition d'une infection nosocomiale liée à une ponction veineuse.


Ce garrot est fabriqué à partir d'un matériau composite spécifique qui procure un standard hygiénique optimal ainsi qu'un confort élevé pour le patient.




Pose du garrot à usage unique

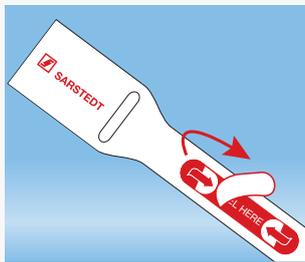


- Retirer le garrot à usage unique de son emballage et déchirer la languette en suivant la ligne prédécoupée.
- Retirer l'étiquette adhésive « Peel here ».

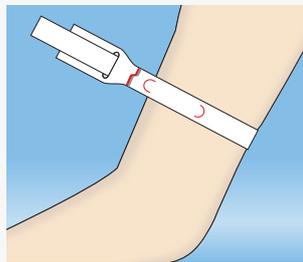

- Placer le garrot à usage unique autour du bras côté imprimé vers l'extérieur.

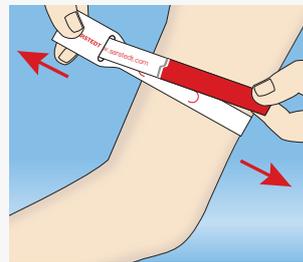


- Serrer le garrot et le fixer avec une largeur d'une main environ au-dessus du point de ponction.
- Le garrot doit permettre de sentir le pouls (pression: 50-100 Hg,
- Durée de l'opération: 1 minute max.

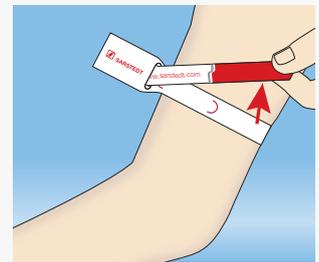

- Desserrer et retirer le garrot.

Sous réserve de modifications techniques

Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays

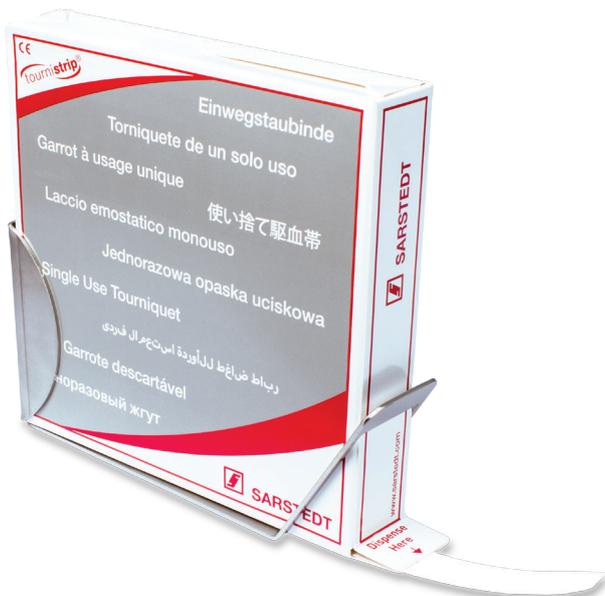

Information de commande

Réf.	Désignation	Conditionnement
95.1006	Garrot à usage unique	200/Boîte
95.1005	Support mural	1/Boîte

Sarstedt S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tel: +33 3 84 31 95 95
Fax: +33 3 84 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com