


Torniquete de un solo uso

NUEVO!

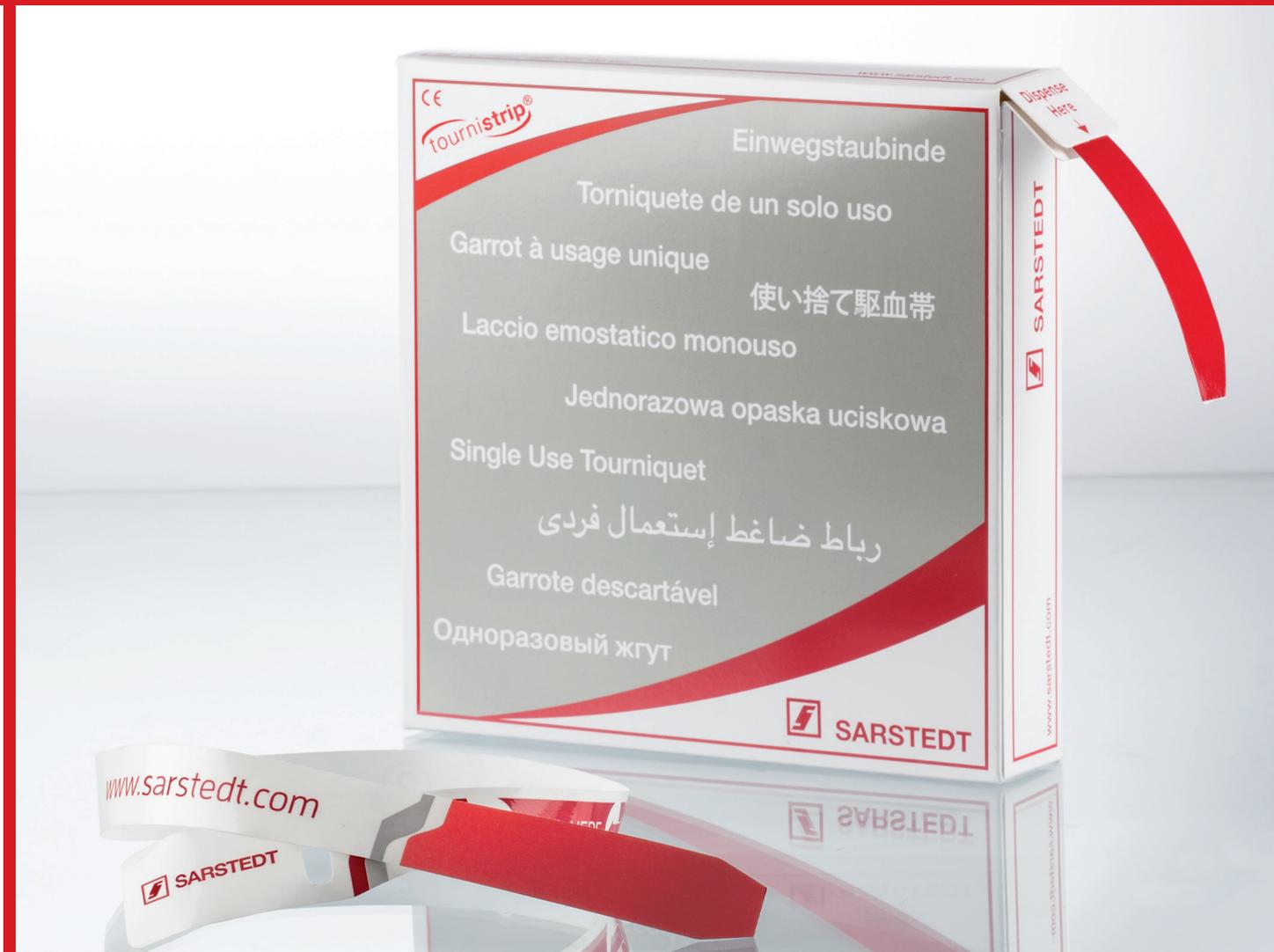

La solución higiénica para la mejora de la seguridad

- Minimiza el riesgo de contaminación
- Fácil manejo
- Sin pellizcos, sin dolor incluso en brazos velludos

Estándar higiénico óptimo

Los torniquetes de un solo uso, minimizan el riesgo de contaminación cruzada y las infecciones nosocomiales causadas por la punción venosa.


El torniquete está fabricado con un compuesto especial de papel/plástico que proporciona un estándar higiénico óptimo además de un confort máximo para el paciente.




Como usar el torniquete de un solo uso




- Tire del torniquete de la caja y corte por la línea perforada
- Retirar la etiqueta "PEEL HERE"

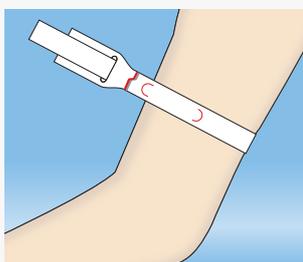

- Pasar el torniquete alrededor del brazo con la impresión hacia arriba

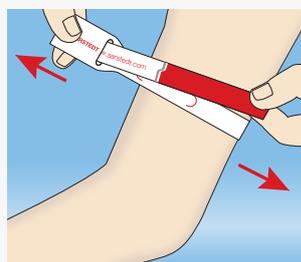


- Ajustar a unos centímetros por encima del punto de punción
- El pulso debe ser perceptible (presión del torniquete 50-100 Hg)
- Tiempo máximo de constricción: 1 min

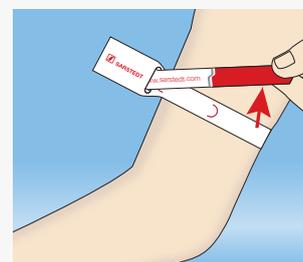

- Retirar y desechar

Modificaciones técnicas reservadas

Este folleto puede contener información de productos que podrán no estar disponibles en algunos países

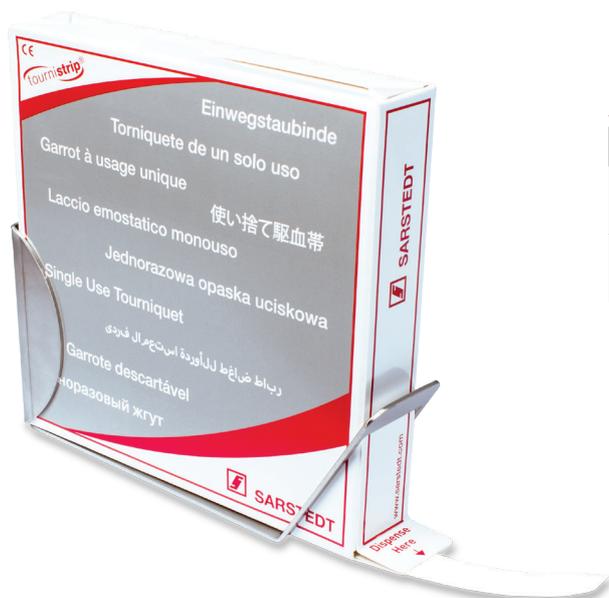

Información para pedidos

Referencia	Descripción	Presentación
95.1006	Torniquete de un solo uso	200/caja
95.1005	Soporte de pared	1/caja

Sarstedt S.A.U.
 Camí de Can Grau, 24
 Pol. Ind. Valldoríol
 08430 La Roca del Vallès
 Tel: +34 93 846 4103
 Fax: +34 93 846 3978
 info.es@sarstedt.com
 www.sarstedt.com