



## *Blodprøvetakingsutstyr for pediatri*

# Pediatri

Skånsom blodprøvetaking på våre minste pasienter



Nyfødte



Spedbarn og småbarn



Barn

## Våre minste pasienter

Kravene som stilles til blodprøvetaking av våre minste pasienter er spesielle. Med dette i tankene har vi utviklet spesifikke løsninger for skånsom prøvetaking.

For oss er det viktig å ivareta denne sårbare pasientgruppen ved å minimere diagnostisk blodtap. Derfor har vi en omfattende produktportefølje med en rekke løsninger for prøvetaking, både kapillært og venøst.

## Løsninger for alle aldersgrupper



# Neonatologi - nyfødte

Minimale prøvevolumer for våre minste pasienter



## Mikronål, mikroprøverør

&  
Safety-Heel®



### Mikronål & mikroprøverør

Mikronålen er utviklet for å imøtekomme de spesifikke behovene til neonatologi. Mikronålen har en rillet holder som sikrer optimal og sikker venepunksjon. Nålen er tilgjengelig i tre ulike størrelser; 21, 23 og 25 G. Den korte utformingen av kanylen betyr et minimalt dødsvolum under prøvetaking. Mikronålholderen sikrer enkel håndtering av nålen, og gir mulighet for justering av kanylen etter venepunksjon ved for eksempel blokkering av kanylens skrånkant.

Fra mikronålen dryppes blodet direkte over i Microvette® eller i mikrorør. Rørene tilbys med skru- eller push-kork, klar til bruk med ulike tilsetninger og volum fra 100 µl til 1,3 ml.

### Safety-Heel®

Metabolske sykdommer og endokrinopater bør oppdages så tidlig som mulig hos nyfødte, slik at riktig behandling kan settes i gang.

En blodprøve til screening av nyfødte tas vanligvis ved å sette et stikk i babyens hæl. Stikksetting med tradisjonelle lansetter er imidlertid vertikal, så risikoen for skade (dvs. avskjæring av flere lag med hud helt inn til beinet) og hematom er svært høy.

Ved å lage halvsirkulære snitt og grunnere kutt, motvirker Safety-Heel® dannelsen av hematom, og sikrer at prøvetakingen blir en mye mindre smertefull opplevelse for den lille pasienten.

### Enkel bruk

En rillet holder sørger for sikker og enkel venepunksjon



Safety-Heel®  
Milde hælssnitt



# Babyer - spedbarn

Prøvetaking av kapillærblod fra spedbarn



## Microvette® & Sikkerhetslansett



### Sikkerhetslansett & Microvette®

Våre sikkerhetslansetter er tilgjengelige i ulike nålestørrelser og stikkdybder som gir ulike blodvolumer. Dette gir derfor fleksibilitet avhengig av de små pasientenes anatomier.

Vår Microvette® er tilgjengelig med volum fra 100 µl til 500 µl. Kapillærprøvene kan tas ved å bruke det integrerte kapillærrøret eller ved direkte overføring på rørkanten. Mikrovettene kan også brukes til åpen venøs prøvetaking.

### Microvette® - ett produkt, tre bruksformål

Microvette® gjør det mulig å ta blodprøver med integrert kapillærrør, prøvetakingskanten eller fra åpen venøs prøvetaking.



Microvette® 100/200 - blodprøvetaking med integrert kapillærrør



Microvette® 300/500 - blodprøvetaking med prøvetakingskant



Microvette® med mikronål

### Ulike alternativer for stikksted med sikkerhetslansetten



# Småbarn - barn

Prøvetaking av veneblod med minimalt prøvevolum




## S-Monovette® & Safety-Multifly®-kanyler



### Safety-Multifly®-kanyler & S-Monovette®

Følsomheten til moderne analyseinstrumenter gjør det mulig å redusere blodprøvevolumet som kreves for å gjennomføre omfattende rutineundersøkelser. Takket være sin spesielle design, med mindre dimensjoner og et lavere nominelt volum, oppfyller S-Monovette® strenge pediatrikrav. S-Monovette® gir muligheten for skånsom blodprøvetaking ved bruk av aspirasjonsteknikken. S-Monovette® er derfor den ideelle løsningen for vanskelige venetilstander hos pediatri pasientene.

*Sikkerhet og komfort for pasient og bruker*

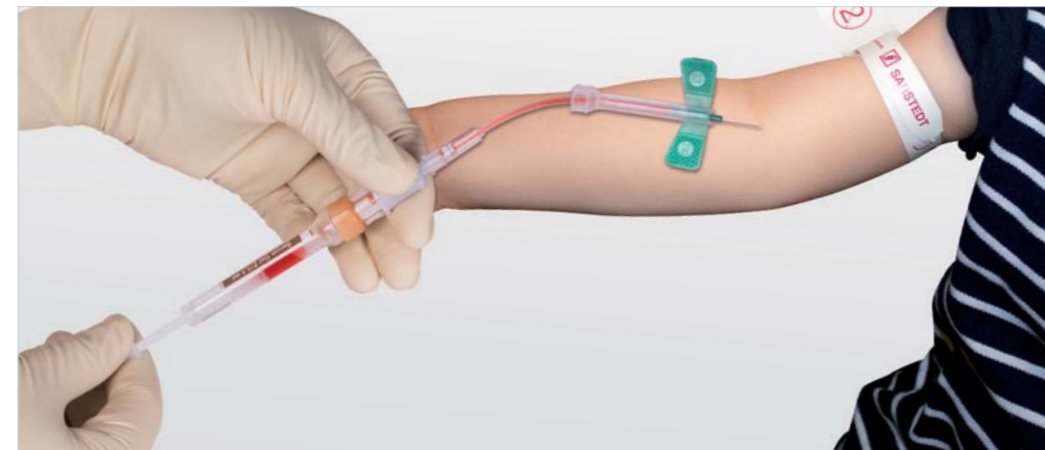

## S-Monovette® & Microvette® (inkl. rørforlenger)

	Serum	Serum-gel	Litium-heparin	Litium-heparin-gel	EDTA	Fluor	Citrat	Senkning
<b>S-Monovette®</b> 1,1 / 1,2 ml 8 mm Ø <sub>1,3</sub>	06.1663.100	06.1667.001	06.1666.100	06.1669.100	06.1664.100	06.1665.100	06.1668.100	05.1079.100*
<b>Microvette®</b> 500 µl <sub>1,2</sub>	20.1343.100	20.1344	20.1345.100	20.1346.100	20.1341.102			
<b>Microvette®</b> 300 µl <sub>1,2</sub>	20.1308.100		20.1309.100			20.1307.100		
<b>Microvette®</b> 200 µl <sub>1,2</sub>	20.1290.100	20.1291	20.1292.100		20.1288.100	20.1289.100		
<b>Microvette®</b> 100 µl <sub>1,2</sub>	20.1280.100		20.1282.100		20.1278.100			

\* S-Monovette® 2 ml, 66 x 11 mm Ø

<sup>1</sup> egner seg til rørforlenger 75 x 13, ordrenr. 55.1571

<sup>2</sup> egner seg til rørforlenger 75 x 13, ordrenr. 55.525.302

<sup>3</sup> egner seg til rørforlenger 65 x 13, ordrenr. 55.1572

## Mikroprøverør

	Serum	Serum-gel	Litium-heparin	EDTA	Fluor	Citrat
<b>Mikroprøverør</b> 1,3 ml med push-cap	41.1501.105	41.1500.005	41.1503.105	41.1504.105	41.1505.105	41.1506.105
<b>Mikroprøverør</b> 1,0 ml med push-cap						41.1506.100
<b>Mikroprøverør</b> 0,5 ml med push-cap						41.1506.102
<b>Mikroprøverør</b> 1,3 ml med skrukork	41.1392.105		41.1393.105	41.1395.105	41.1394.105	41.1350.105
<b>Mikroprøverør</b> 1,3 ml med membranskrukork				41.3395.105		
<b>Mikroprøverør</b> 1,1 ml med skrukork		41.1378.005				

## Mikronål, sikkerhetslansett, Safety-Heel® Hællansett, Safety-Multifly®-kanyle

	21 G	23 G	25 G	28 G	Blad 1,5 rett	Blad 1,75 snitt	Blad 2,5 snitt
<b>Mikronål</b>	85.921	85.923	85.925				
<b>Sikkerhetslansett</b>				85.1015	85.1019		
<b>Safety-Heel® hællansett</b>						85.1025	85.1026
<b>Safety-Multifly®- kanyle</b>	85.1638.205	85.1640.205	85.1642.205				

Også tilgjengelig for pediatri pasienter:  
Urin-Monovette®

Ordrenr.	Volum i ml	Rørlengde / Ø i mm	Design	antall/kartong
10.250.001	3.2	75/13	med papiretikett, inkl. sugespiss	512






## Pre-analytical workflow - utviklet av SARSTEDT

Oppnå synergi ved bruk av våre koordinerte løsninger for din pre-analyse

Oppdag våre løsninger for din pre-analyse online



[workflow.sarstedt.com](http://workflow.sarstedt.com)

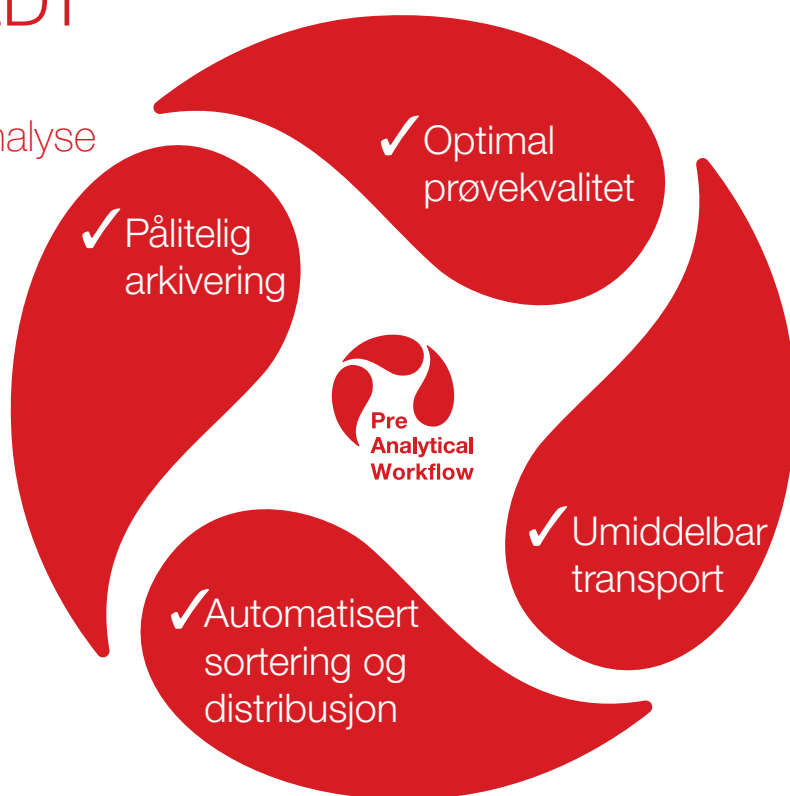

*Skulle du ha spørsmål,  
hjelper vi deg gjerne!*

SARSTEDT AS  
Rosenholmveien 25  
1414 Trollåsen  
Tel: +47 64 85 68 20  
[info.no@sarstedt.com](mailto:info.no@sarstedt.com)  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)