

# Éliminer ses déchets en toute sécurité avec la Multi-Safe twin Plus 500

## Les options de montage

### Variante A



Centrer le couvercle sur la partie inférieure de la boîte. Exercer une pression simultanée des deux pouces à droite et à gauche des encoches du couvercle pour emboîter ce dernier sur la partie inférieure jusqu'à ce que le bord externe de la partie inférieure s'enclenche de manière audible et visible (❶). Répéter cette procédure sur toute la périphérie pour les autres encoches (❷-❸).

### Variante B



Poser le couvercle sur une surface stable. Appliquer la partie inférieure de la boîte à déchets par le haut sur le couvercle. Emboîter fermement la partie inférieure sur le couvercle de manière à ce que le bord externe de la partie inférieure s'enclenche de manière audible et visible sur toute sa périphérie.

## Fermeture temporaire



Exercer une pression au milieu du couvercle (❶) pour que la fermeture temporaire s'enclenche complètement de manière à ce que le couvercle soit correctement fermé.

**Attention :** ne pas enfoncer la fermeture définitive lors de l'ouverture du couvercle (❷).

## Consignes de sécurité

- Ne pas remplir au-delà du repère de la ligne de remplissage.
- Ne pas forcer pour placer les objets dans la boîte.
- Ne pas plonger les doigts dans la boîte.
- Ne pas verser de liquides dans la boîte
- Avant de fermer le couvercle, vérifier qu'aucun objet ne dépasse de l'ouverture.
- Ne pas comprimer la boîte de l'extérieur d'une quelconque manière et ne pas la jeter.

SARSTEDT S.A.R.L.  
Route de Gray  
Z.I. des Plantes  
70150 Marnay  
Tel: +33 384 31 95 95  
Fax: +33 384 31 95 99  
info.fr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**