

Eliminación segura con Multi-Safe twin 500 plus

Opciones de montaje

Opción A



Coloque la tapa sobre el contenedor. Presione firmemente la tapa con ambos pulgares situados a la derecha y a la izquierda de las pestañas, hasta que la pestaña de la parte inferior amarilla encaje audible y visiblemente (❶). Repita este procedimiento en toda la circunferencia para las demás pestañas (❷-❹).

Opción B



Deposite la tapa sobre una superficie estable y coloque el contenedor sobre la tapa. Presione el contenedor con firmeza sobre la tapa, de modo que las pestañas encajen audible y visiblemente en toda la circunferencia.

Tapa de día



Presionar sobre el centro de la tapa (❶) para que el cierre de día quede correctamente cerrado.

Atención: Al abrir el cierre de día **no** presione el cierre definitivo (❷).

Indicaciones de seguridad

- No supere la línea de llenado marcada.
- No introduzca a la fuerza ningún objeto en el contenedor.
- No introduzca la mano en el contenedor.
- No lo utilice para desechar líquidos.
- Antes de sellar la tapa del día, asegúrese que no sobresalga ningún objeto por la abertura.
- No comprima ni ejerza presión sobre el contenedor.

SARSTEDT S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriolf
08430 La Roca del Vallès
Tel: +34 93 846 4103
Fax: +34 93 846 3978
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com