


# 透明なプラスチックラベルのついたS-Monovette® へのバーコードラベルの正しい貼り付け方

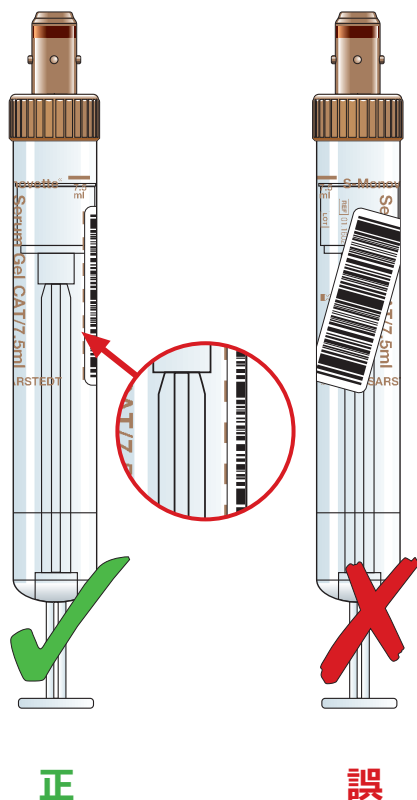


- S-Monovette®のプラスチック製ラベルの点線に合わせてバーコードラベルを貼り付けてください。
- バーコードラベルを斜めに貼ったり、チューブの周囲に貼ったりしないでください。

以下の条件を満たす場合、プラスチック製ラベルのついたサンプル容器は、正しくラベルを貼り付けられています。

- S-Monovette®のプラスチック製ラベルの点線に合わせてバーコードラベルが貼られていること。
- 内容物をはっきりと確認できること。
- 内容物の容量の確認が可能であること。  
そのためには、目盛よりも低い位置にラベルを貼る必要があります。
- ラベルがスクリーキャップの取り外しを妨げないこと。
- チューブとラベルが遠心分離機内に詰まったり、貼り付いたりしないこと。



# 紙製ラベルのついたS-Monovette® へのバーコードラベルの正しい貼り付け方

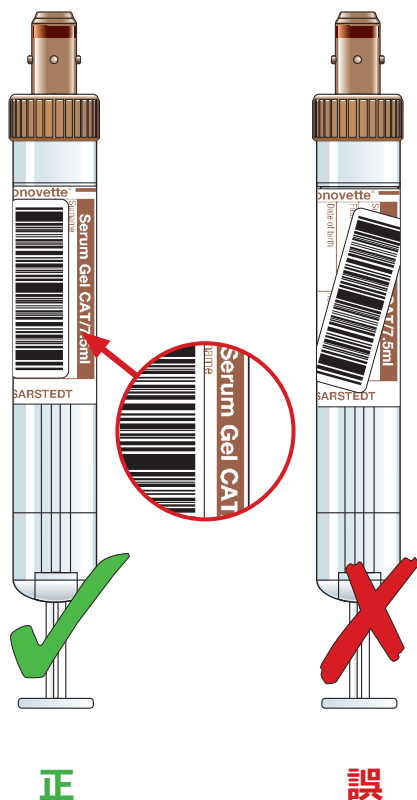

- バーコードラベルを、S-Monovette®の既存の紙製ラベルの**上**に貼り付けてください。添加剤に関する記載は、バーコードラベルの右側となります。
- サンプルの目視確認用領域を確保するため、バーコードラベルを紙製ラベルの**横**に貼るの  
はおやめください。

以下の条件を満たす場合、紙製ラベルのついたサンプル容器は、正しくラベルを貼り付けられています。

- S-Monovette®の既存の紙製ラベルの上に合わせてバーコードラベルが貼られていること。
- 内容物をはっきりと確認できること。
- 内容物の容量の確認が可能であること。
- ラベルがスクリーキャップの取り外しを妨げないこと。
- チューブとラベルが遠心分離機内に詰まったり、貼り付いたりしないこと。



ザルスタット株式会社  
〒101-0047  
東京都千代田区内神田2-16-11  
内神田渋谷ビル 8階  
Tel: +81 3 3526 3530  
Fax: +81 3 3526 0870  
info.jp@sarstedt.com  
www.sarstedt.com