

# Návod k použití Formalínový systém

## Připojení:



1. Ujistěte se, že formalínový systém neprosakuje a je nepoškozený.
2. Vložte formalínový systém do speciálního nástěnného držáku (REF 95.1706).
3. Ujistěte se, že kohout je ve vodorovné poloze, tedy bezpečně uzavřený.

## Použití:


1. Používejte vhodné ochranné rukavice.
2. Přes kontrolní okénko zkontrolujte, zda je roztok v lahvičce bezbarvý, čistý a průhledný. Jsou-li patrné jakékoliv známky zakalení nebo zbarvení, celý formalínový systém zlikvidujte.



3. Odšroubujte zátku z S-Monovette® a naplňte ji vzorkem. Pokud nechcete S-Monovette® naplnit do maximálního objemu, lehce povytáhněte píst odzátkované S-Monovette® do požadované polohy.
4. Nasadte zátku zpět na S-Monovette®.



5. S-Monovette® pevně připojte k adaptéru formalínového systému tak, že pootočíte S-Monovette® asi o 2 až 3 mm doprava.
6. Otevřete kohout tak, že jím otočíte o 90°. Nyní můžete vytažením pístu naplnit S-Monovette® formalínem.

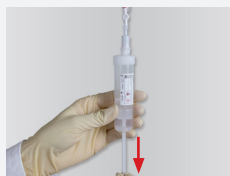

7. Dbejte na to, abyste vytáhli píst až do slyšitelného zacvaknutí do dna S-Monovette®. Pozor: není možné zabránit tomu, aby do horní části zkumavky vnikl vzduch. Proto netlačte píst opačným směrem. Pokud to uděláte, je nutno formalínový systém zlikvidovat.
8. Uzavřete formalínový systém tak, že otočíte kohout zpátky o 90°. Pootočením o 2 až 3 mm doleva odpojte S-Monovette® od systému.



9. Znovu se ujistěte, že kohout formalínového systému je ve vodorovné poloze, a tedy bezpečně uzavřený.
10. Odlomte píst S-Monovette®.

## Likvidace:

1. Nádobky obsahující formalín a rukavice na jedno použití zlikvidujte podle interních předpisů své instituce.