
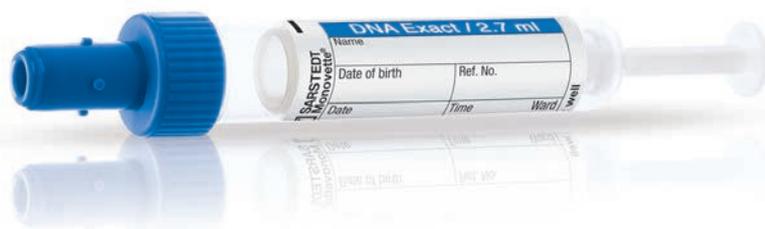


S-Monovette® DNA Exact

Estabilização padronizada pre-analítica de gDNA

NOVO!

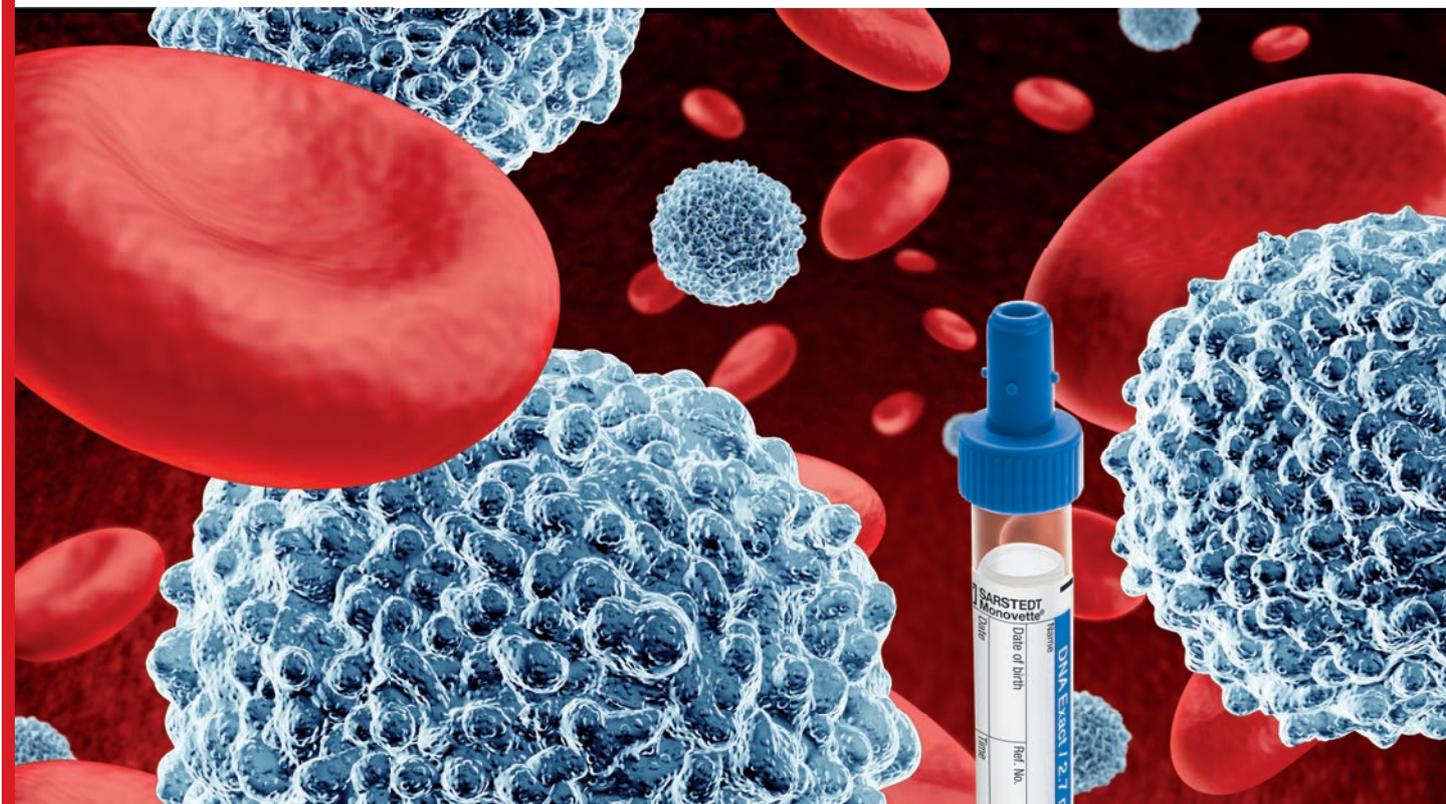

S-Monovette® DNA Exact

- Isolamento reprodutível de alta qualidade de gDNA.
- Parâmetros de tempo e temperatura validados.
- Comparabilidade ideal de amostra.


Flutuações de temperatura durante o transporte e armazenamento de amostras de sangue podem ter um efeito adverso sobre a qualidade do gDNA. O novo S-Monovette® DNA Exact (CE / IVD) estabiliza o gDNA na amostra, permitindo uma amostra padronizada sob condições de armazenamento:

- 5 dias a 35°C
- 14 dias a 22°C
- 28 dias a 4°C
- Pelo menos 1 ano a -20°C (estudo em progresso)
- 5 ciclos de congelamento e descongelamento


Estabilização do DNA durante o transporte e armazenamento

1. S-Monovette® DNA Exact

a) Armazenamento a 35 °C

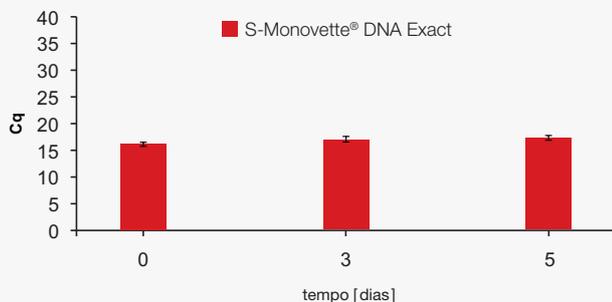


b) Armazenamento a 4°C

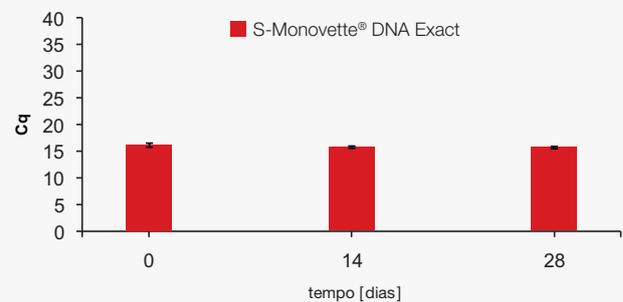

2. S-Monovette® DNA Exact vs. outros produtos

Armazenamento a 22 °C

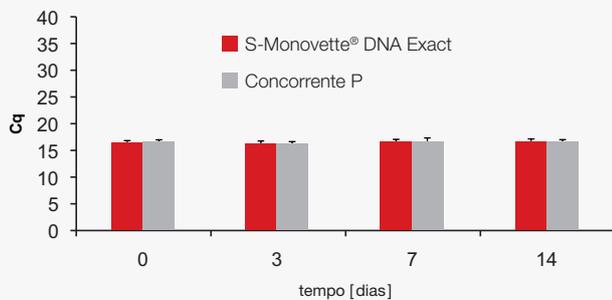

Procedimentos do teste:

PCR em tempo real de um fragmento do gene GAPDH. O gráfico mostra a mediana dos níveis Cq detectados que foram determinados a partir de amostras de DNA isoladas a partir de amostras de sangue total. As amostras foram armazenadas no S-Monovette DNA Exact ou em um produto de marca concorrente, em conformidade com os parâmetros de temperatura e de tempo definidos. As barras de erro representam os desvios padrão (Fig. 1a e 1b, n = 40; Fig. 2, n=3).

Para mais informações e dados sobre o S-Monovette® DNA Exact, por favor consulte o artigo “S-Monovette® DNA Exact - A new IVD Certified Blood Collection Tube for Collection, Transport and Stabilization of Whole Blood for Genomic DNA Analysis” (S-Monovette® DNA Exact - O novo tubo de coleta sanguínea para coleta, transporte e estabilização do sangue total para análise genômica de DNA)

Informações para pedidos

| Código | Descrição | Embalagem |
|-------------|-------------------------------|---|
| 04.1948.001 | S-Monovette® DNA Exact 2,7 ml | 50 und/caixa interna, 500/caixa externa |

SARSTEDT LTDA.
Alameda Ásia, 144
Polo Empresarial Tamboré
CEP 06543-312
Santana do Parnaíba - SP
Fone 55 11 4152-2233
Fax 55 11 4152-3198
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com