

Einweg-Staubbinde

NEU!



Das hygienische Produkt für Ihre Sicherheit

- Minimiert das Kontaminationsrisiko
- Einfache Anwendung
- Nicht einschnürend – Schmerzfrei auch bei behaarten Armen

Handhabung der Einweg-Staubbinde


Optimaler, hygienischer Standard

Einwegstaubbinden minimieren das Risiko von Kreuzinfektionen und das Entstehen nosokomialer Infektionen durch Venenpunktionen.


Die Einweg-Staubbinde aus einem speziellem Verbundmaterial bietet zusätzlich zu diesem optimalen, hygienischen Standard einen hohen Patientenkomfort.




Handhabung

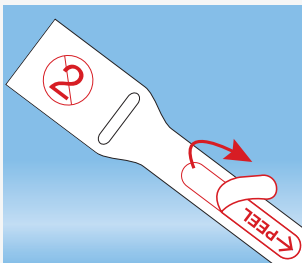


- Einweg-Staubbinde aus der Packung ziehen und an der Perforationslinie abreißen
- Aufkleber „PEEL HERE“ entfernen

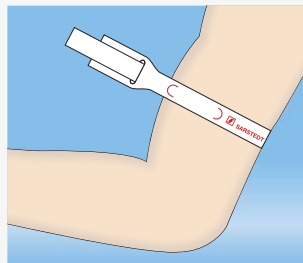

- Einweg-Staubbinde mit der bedruckten Seite nach außen um den Arm legen

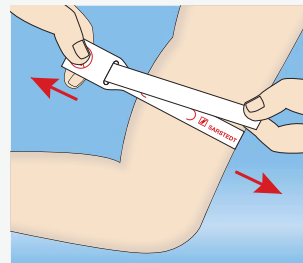


- Eine Handbreit über der Punktionsstelle anziehen und festkleben
- Puls muss fühlbar sein (Staudruck 50-100 Hg)
- Stauzeit max. 1 Minute

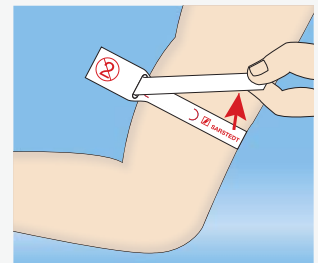

- Staubbinde lösen und entfernen

Technische Änderungen vorbehalten

Diese Publikation kann Informationen zu Produkten enthalten, die evtl. nicht in jedem Land verfügbar sind

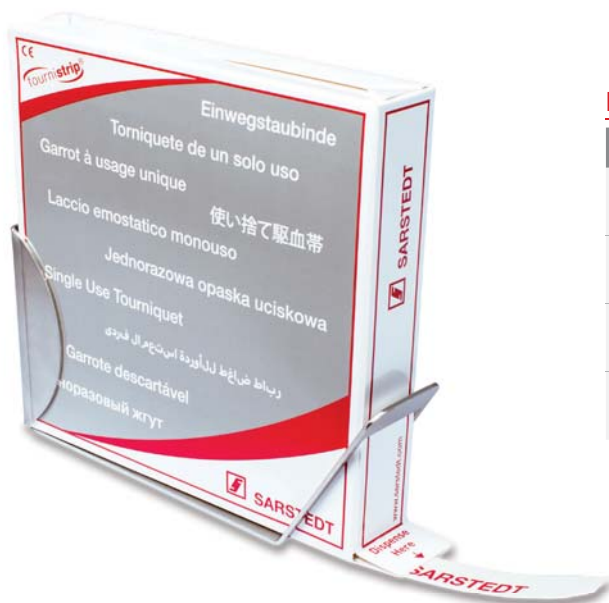

Bestellinformation

Bestell-Nummer	Bezeichnung	Verpackung
95.1006	Einweg-Staubbinde	200/IK
95.1006.025	Einweg-Staubbinde, zu 25/IK	25/IK
95.1005	Wandhalter	1/IK
95.1004	Pädiatrie Einweg-Staubbinde	100/IK

SARSTEDT AG & Co.
 Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
 Telefon (+49) 0 22 93 30 50
 Telefax (+49) 0 22 93 305-282
☎ Service 0800 (Deutschland)
 Telefon (0800) 0 83 30 50
 info@sarstedt.com
 www.sarstedt.com