
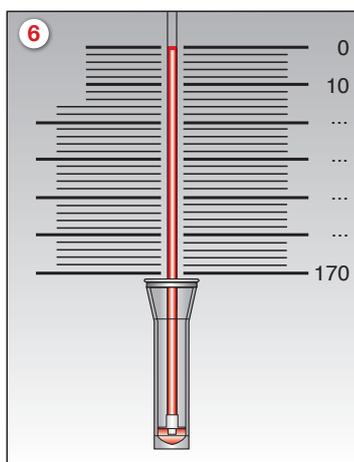
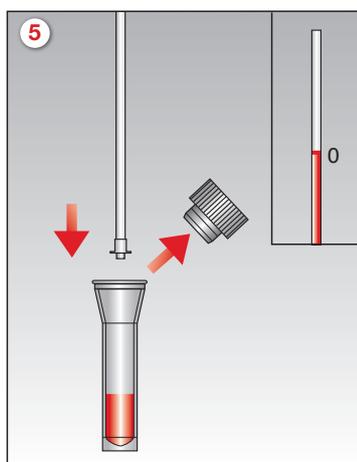
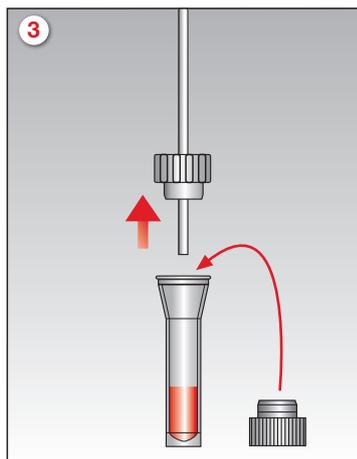
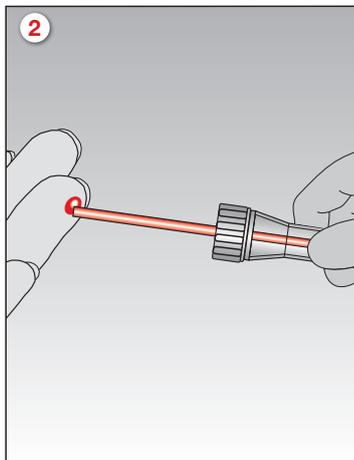


# Microvette® CB 200 - VSG

## Guía de Uso

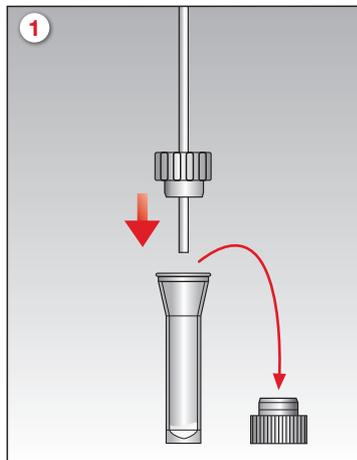

1. Remueva el tapón del Microvette® con aditivo de citrato y guárdelo para más adelante. Adapte el recolector capilar "end-to-end".
2. Recolecte la sangre con el capilar "end-to-end". Los mejores resultados son obtenidos si se sostiene el Microvette® de manera horizontal o en posición ligeramente inclinada. La recolección está completa cuando el capilar "end-to-end" está completamente lleno.
3. Una vez llenado, sostenga el tubo de manera vertical para permitir que la sangre baje hacia el Microvette® hasta que se vacíe todo el capilar. Remueva la tapa con el tubo capilar como una sola unidad. Coloque el tapón inicial.
4. Mezcle la sangre completamente mediante inversiones sutiles del Microvette®.
5. Remueva el tapón y descarte. Inserte el tubo de sedimentación en el Microvette® hasta que la sangre llegue a la marca "0".
6. Coloque el Microvette® con el tubo de sedimentación insertado en la "gradilla Microvette® CB 200". Ajuste la parte superior de la columna de sangre en cero usando el control de ajuste de altura.

**Todas las muestras de pacientes deberán manejarse con precauciones estándar. ¡Siempre utilice guantes!**

SARSTEDT México S. de R.L. de C.V.  
Alfredo B Nobel 3, Bodega 10  
Colonia Los Reyes Industrial  
54073 Tlalnepanitla de Baz  
Estado de México  
Tel: +5255 8501 1577  
Fax: +5255 8501 1578  
info.mx@sarstedt.com  
www.sarstedt.com