



Bezpieczna igła

Instrukcja użycia

Przed pobraniem krwi

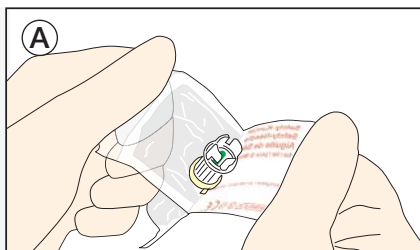


Opakowanie należy otworzyć kciukiem i palcem wskazującym techniką „peel-off”, czyli przez rozerwanie.

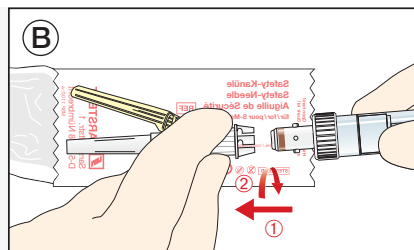


Połączyć S-Monovette® z uchwytem bezpiecznej igły.

LUB

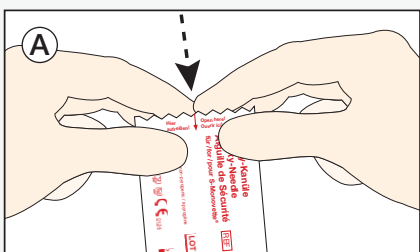


Rozerwać opakowanie wzdłuż usytuowanej centralnie strzałki.

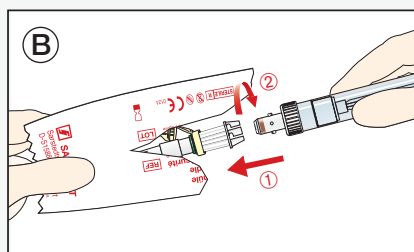


Połączyć S-Monovette® z uchwytem bezpiecznej igły.

Po pobraniu krwi

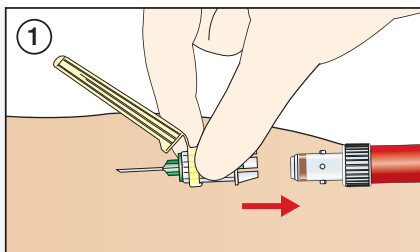


Odłączyć ostatnią probówkę S-Monovette® od bezpiecznej igły i następnie wyciągnąć bezpieczną igłę z żyły.


Aktywacja osłony igły...

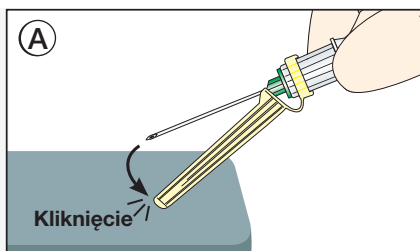

Na stabilnej powierzchni nałożyć osłonę igły i aktywować ją.

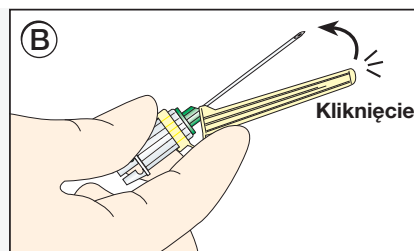

Alternatywnie osłonę igły aktywować na dolnym końcu palcem wskazującym.

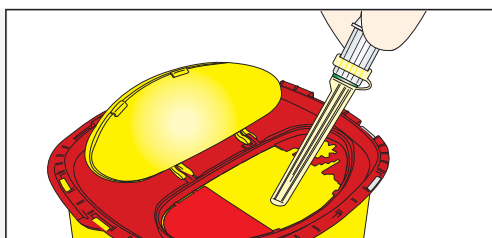


Po aktywacji osłony igły należy wyrzucić zabezpieczoną bezpieczną igłę do pojemnika na odpady.


Bezpieczna igła Multifly®

Instrukcja użycia

Przed pobraniem krwi

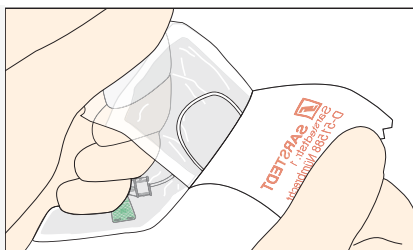


Opakowanie należy otworzyć kciukiem i palcem wskazującym techniką „peel-off”, czyli przez rozerwanie.

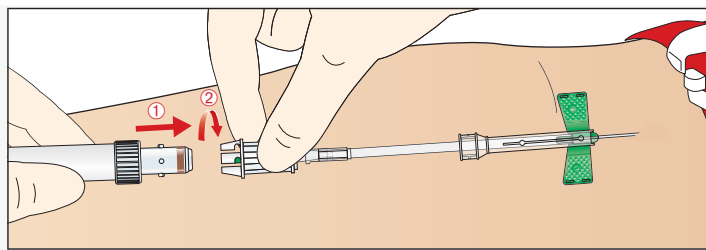

Połączyć S-Monovette® z uchwytem bezpiecznej igły Multifly®.


Po pobraniu krwi

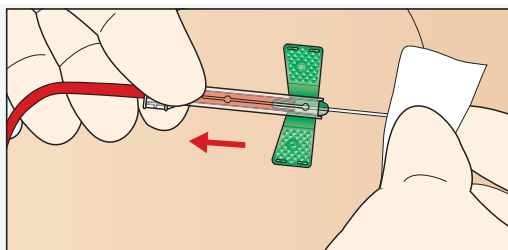

Kciukiem i palcem wskazującym chwycić u góry i u dołu osłonę igły za tylny koniec i wyciągnąć bezpieczną igłę Multifly® z żyły.


Aktywacja osłony igły...

...w żyłę

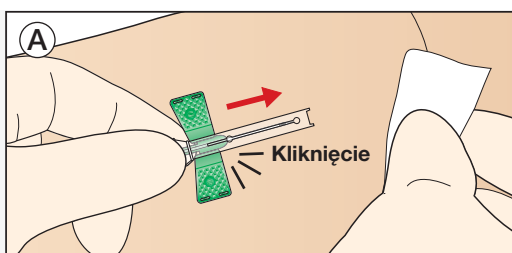


Aktywować osłonę igły równoległe do wyciągnięcia bezpiecznej igły Multifly® z żyły.

...poza żyłą

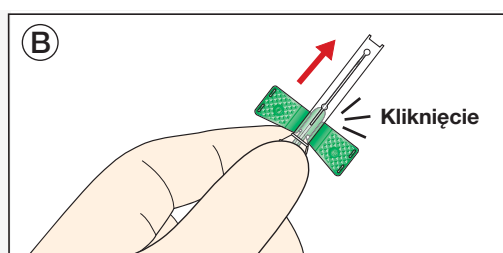

Wyciągnąć bezpieczną igłę Multifly® z żyły i aktywować osłonę igły.

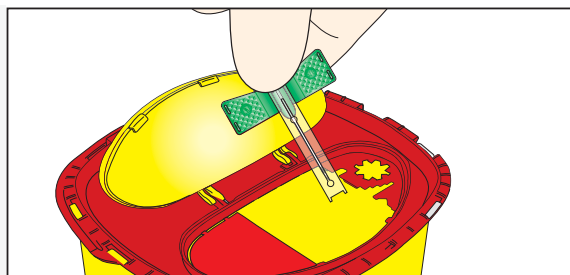

Po aktywacji osłony igły wyrzucić zabezpieczoną bezpieczną igłę Multifly® do pojemnika na odpady.

SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
Tel: +48 22 722 05 43
Fax: +48 22 722 07 95
info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com