

Blutgas-Analytik

Entnahmesysteme für die arterielle, venöse und kapillare Probengewinnung



Arterielle und venöse Probengewinnung & Zubehör

Reduziertes Probenvolumen

In der venösen und arteriellen Blutgas-Analytik wurde für eine Reduzierung der Patientenbelastung als Erweiterung zu der bekannten 2ml Blutgas-Monovette® das Programm um eine 1 ml-Ausführung ergänzt.

Durch die Verwendung von Ca^{2+} balanciertem Heparin sind die Systeme auch für die Bestimmung von Elektrolyten geeignet.

Hygienische Entlüftung

Der Entlüfter wird nach der Blutentnahme auf die Blutgas-Monovette® aufgesetzt und die enthaltene Luft ohne Verwendung eines Tupfers hygienisch und kontaminationsfrei in das Entlüftergehäuse gedrückt.

Der Entlüfter kann für den hausinternen händischen Transport zum Analysensystem verwendet werden.



Kapillare Probengewinnung & Zubehör

Für geringe Probenmengen und eine optimale Gerätekompatibilität sind Blutgaskapillaren aus Kunststoff in verschiedenen Größen und Volumina erhältlich.

Zuverlässige Messergebnisse

Der spezielle Kunststoff mit seiner geringen Gasdurchlässigkeit und die ausgewählte Beschichtung mit Ca^{2+} balanciertem Heparin gewährleisten korrekte Messergebnisse.

Durch die besondere Oberflächenbehandlung und damit schnelle Füllung der Kapillaren wird die Probenentnahme vereinfacht und das Risiko der Gerinnselbildung reduziert.

Sichere Entnahmen

Der bruchsichere Kunststoff verhindert Verletzungen und Infektionen von Anwendern.



Verschlusskappen

Verschiedene Verschlusskappen-Größen gewährleisten ein korrektes und sicheres Verschließen der Kapillaren mit unterschiedlichen Außendurchmessern.



Mischstäbchen und Magnet

Für ein optimales Vermischen des Proben-Materials mit dem Antikoagulant eignet sich der griffige Kegelmagnet, der das Mischstäbchen innerhalb der Kapillare hin und her bewegt.



Bestellinformation - Blutgas-Monovette®

Bezeichnung	Verpackung Innenkarton / Karton	Bestell-Nr.
Blutgas-Monovette® 1 ml	50 / 500	05.1146
Blutgas-Monovette® 1 ml, einzeln steril	100 / 500	05.1146.020
Blutgas-Monovette® 2 ml	50 / 500	05.1147
Blutgas-Monovette® 2 ml, einzeln steril	100 / 500	05.1147.020
Blutgas-Monovette® 2 ml, Entlüfter montiert, einzeln steril	100 / 500	05.1147.048
Entlüfter	500 / 1.000	14.1148

Bestellinformation - Blutgaskapillaren aus Kunststoff

Bezeichnung	ø/Länge in mm	Verpackung Stück	Bestell-Nr.
Blutgaskapillaren aus Kunststoff 100 µl	2,05/100	250	19.930.100
Blutgaskapillaren aus Kunststoff 125 µl	2,05/110	250	19.930.125
Blutgaskapillaren aus Kunststoff 140 µl	2,3/75	200	19.930.140
Blutgaskapillaren aus Kunststoff 175 µl	2,3/100	200	19.930.175

Bestellinformation - Blutgaskapillaren-Sets aus Kunststoff

Bezeichnung	Verpackung Stück	Bestell-Nr.
Blutgaskapillaren-Set 100 µl, Verschlusskappen und Mischstäbchen	1.000	51.931.100
Blutgaskapillaren-Set 125 µl, Verschlusskappen und Mischstäbchen	1.000	51.931.125
Blutgaskapillaren-Set 140 µl, Verschlusskappen und Mischstäbchen	800	51.931.140
Blutgaskapillaren-Set 175 µl, Verschlusskappen und Mischstäbchen	800	51.931.175

Bestellinformation - Zubehör


Bezeichnung	Verpackung Stück	Bestell-Nr.
Verschlusskappe, weiß für Blutgaskapillare mit Außen-ø 2,05 mm	500	65.935.205
Verschlusskappe, blau für Blutgaskapillare mit Außen-ø 2,3 mm	400	65.935.230
Mischstäbchen, ø 1 mm, Länge 9 mm	250	95.936
Kegelmagnet, rot	10	95.937

Wenn Sie Fragen haben:
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Besuchen Sie auch unsere Internetseite:
www.sarstedt.com

Pre-analytical workflow made by SARSTEDT

Nutzen Sie die Synergie unserer
aufeinander abgestimmten Systeme.

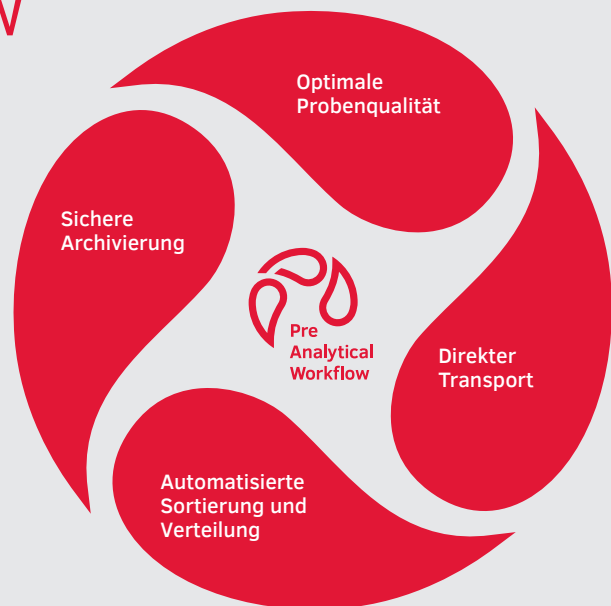

SARSTEDT AG & Co. KG

Sarstedtstraße 1
D-51588 Nümbrecht

Telefon: +49 2293 305 0

Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0

info@sarstedt.com
www.sarstedt.com