

# Multi-Safe

## euroMatic®

### Manipulation sûre des boîtes à déchets

Centrer le couvercle sur la partie inférieure de la boîte.  
L'opercule quotidien rouge et la poignée sont tournés vers l'avant.

Appuyer simultanément sur les rebords opposés pour emboîter le couvercle dans la partie inférieure de la boîte.

Le couvercle doit être solidement enfoncé sur tout le tour, jusqu'à entendre et voir qu'il s'enclenche dans la partie inférieure (voir cercle).



#### Recommandation :

- Ne remplir la boîte à déchets Multi-Safe qu'à env.  $\frac{2}{3}$  du volume
- Ne pas trop remplir la boîte à déchets Multi-Safe : Risque de blessure !



Ligne de remplissage respectée

Voir la marque



Trop rempli


#### Correct

Couvercle bien enclenché

#### Incorrect

Couvercle non enclenché

#### Fermeture quotidienne

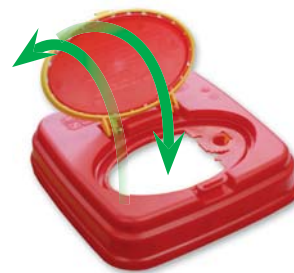

#### Fermeture définitive



#### Précautions de sécurité :

- Ne pas forcer en introduisant des objets dans la boîte
- Ne pas introduire la main dans la boîte
- Ne pas tasser le contenu de la boîte en la secouant
- Avant de fermer l'opercule quotidien, vérifier qu'aucun objet ne dépasse de l'ouverture.
- Ne pas comprimer la boîte de l'extérieur d'une quelconque manière et ne pas la jeter

SARSTEDT S.A.R.L.  
Route de Gray  
Z.I. des Plantes  
70150 Marnay  
Tel: +33 384 31 95 95  
Fax: +33 384 31 95 99  
info.fr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com