

Veilig werken met de Multi-Safe naaldcontainers

De montagemogelijkheden

Variant A



Leg het deksel* gecentreerd op de afvoerbox.

*** Advies:**
Vergroot indien nodig de vulopening voor u het deksel monteert.



Druk het deksel vast door gelijktijdig op 2 **tegenoverliggende** hoeken te duwen.

Variant B



Leg het deksel* op zijn kop op een stabiele ondergrond en zet de afvoerbox (op zijn kop) op het deksel.



Druk de afvoerbox stevig op het deksel zodat deze rondom hoorbaar en zichtbaar vastklikt.




Het deksel stevig aandruwen zodat de gele nokjes rondom hoorbaar en zichtbaar **vastklikken** (zie foto's).



goed
Deksel vergrendeld



fout
Deksel niet vergrendeld

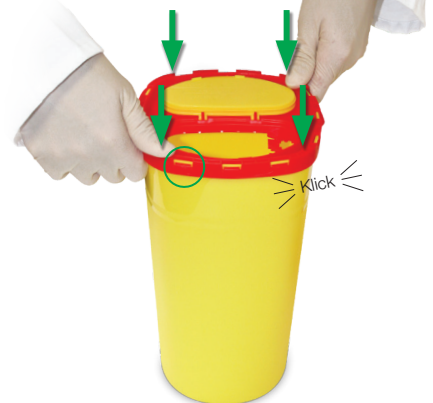

Veiligheidsinstructies

- Vul de box niet boven de gemarkeerde vullijn.
- Druk geen voorwerpen met geweld in de box.
- Grijp niet met de hand in de box.
- Vul de box niet met vloeistoffen.
- Controleer voordat u het dagdeksel sluit of er geen voorwerpen uit de vulopening steken.
- Druk de box niet vanaf de buitenkant op één of andere manier samen en gooi niet met de box.

SARSTEDT BV
Uitbreidingsstraat 84/3
2600 Berchem
Tel: +32 3 541 76 92
Fax: +32 3 541 81 03
info.be@sarstedt.com
www.sarstedt.com

SARSTEDT B.V.
Peningweg 29
4879 AE Etten-Leur
Tel: +31 76 501 75 50
Fax: +31 76 501 76 26
info.nl@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**