

Odběr krve pomocí S-Monovette®

Cesta ke kvalitnímu výsledku



1. Příprava

Nalepení čárového kódu

Linie čárového kódu

Dezinfekce v souladu s hygienickými předpisy zařízení

Konstrikce <1 min

Dezinfekce

Na šířku dlaně nad místem vpichu

Doporučené pořadí při odběru

Podle Gurra ¹ :	Podle CLSI ² :
Hemokultura	Hemokultura
■ Sérová/sérum-gelová krev	■ Citrátová krev
■ Citrátová krev	■ Sérová/sérum-gelová krev
■ Heparinová/heparin-gelová krev	■ Heparinová/heparin-gelová krev
■ EDTA krev	■ EDTA krev
■ Fluoridová/citrát-fluoridová krev (S-Monovette® GlucoEXACT)	■ Fluoridová/citrát-fluoridová krev (S-Monovette® GlucoEXACT)

¹ Gurr et al "Musterstandardarbeitsanweisung Präanalytik" J Lab Med 2011
² CLSI GP41 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture, Approved Guideline

2. Odběr krve

Aspirační technika – Šetrný odběr krve

Před punkcí: Pacienta předem upozorněte

Vakuová technika³ – Odběr krve s přednastaveným vakuem

V zásadě společnost SARSTEDT doporučuje provést první odběr do zkumavky S-Monovette® aspirační technikou, protože je to šetrný způsob zahájení.

3. Manipulace se vzorky a likvidace

SPRÁVNÉ naplnění pro správné výsledky

- citrát
- BSG
- EDTA
- citrát fluorid (S-Monovette® GlucoEXACT)

Několikrát otočte dnem vzhůru

- citrát, CTAD
- PFA
- BSG
- heparin
- EDTA
- ThromboExact
- fluorid, CPDA₁
- citrát fluorid (S-Monovette® GlucoEXACT)

Zajistěte náležitě uložení a přepravu

Po odběru krve: Zkumavku S-Monovette® sérum/sérum-gel nechte 30 min. stát ve svislé poloze a v této poloze také přepravujte

Aktivace jednou rukou

Cvaknutí⁴ nebo Cvaknutí

Rádi bychom vás upozornili na to, že témata zde zpracovaná („Odběr krve pomocí S-Monovette®“) mají pouze doporučující charakter a v žádném případě nenahrazují lékařská, vědecká nebo technická nařízení.

³ Pokud se má nejprve nabírat zkumavka s citrátem, doporučujeme předtím provést odběr do prázdné zkumavky.
 V zásadě společnost SARSTEDT doporučuje provést první odběr do zkumavky S-Monovette® aspirační technikou, protože je to šetrný způsob zahájení. Poté lze pokračovat v odběru vakuovou technikou.
⁴ Ochranný kryt jehly můžete aktivovat také ukazovákem. Pro bezpečnou funkci dbejte na to, aby aktivace probíhala na spodním konci krytu.