

1회용 - 지혈대

새로운!



안전을 위한 위생적인 제품

- 감염 위험 최소화
- 손쉬운 적용
- 조이지 않음 - 팔에 털이 많아도 아프지 않습니다

1회용 지혈대 취급법


최적의 위생 기준

일회용 지혈대는 교차 감염 위험 및 정맥 천자로 인한 병원 감염의 발생을 최소화합니다.


특수 복합 재료 소재의 1회용 지혈대는 이러한 최적의 위생 기준을 충족할 뿐만 아니라, 환자에게 편안한 사용감을 제공합니다.




취급법

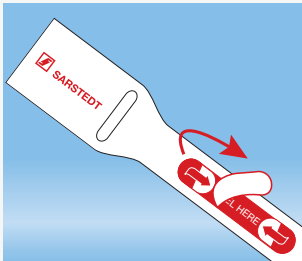


- 1회용 지혈대를 포장에서 꺼내어 절취선을 찢으십시오.
- "PEEL HERE" 스티커를 제거하십시오.

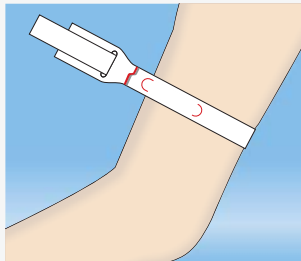

- 인쇄된 면이 바깥을 향하도록 1회용 지혈대를 팔에 끼우십시오.

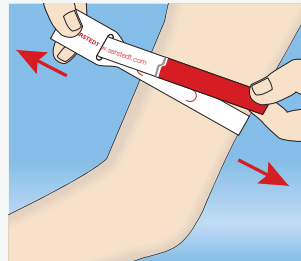


- 천자 위치에서 손바닥 하나 정도 거리를 둔 지점에서 조이고 고정하십시오.
- 맥박이 느껴져야 합니다(배압 50~100Hg)
- 지혈 시간 최대 1분

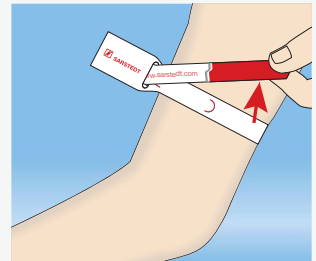

- 지혈대를 풀고 치우십시오.

기술적 변경 가능
본 간행물은 경우에 따라 일부 국가에서 사용할 수 없는 제품을 포함할 수 있습니다.

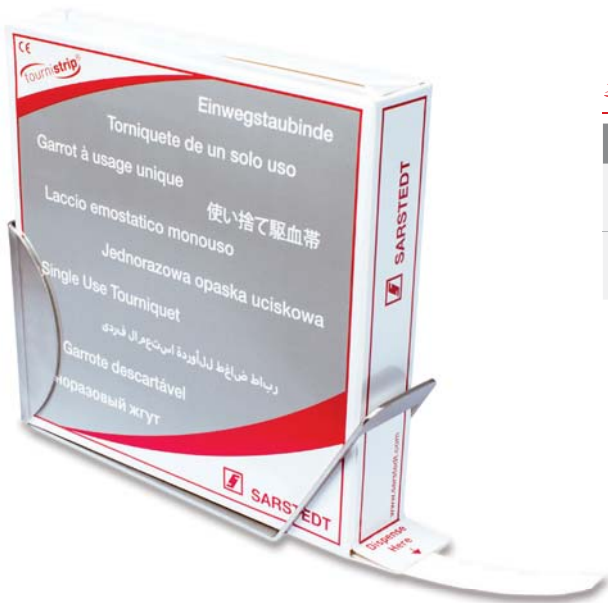

주문 정보

주문-번호	라벨	포장
95.1006	1회용-지혈대	200/IC
95.1005	벽 브래킷	1/IC

SARSTEDT International GmbH
Representation Office South Korea
Samhwan Hypex Building A 301-2,
240 Pangyoeyeok-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 13493
Tel: +82 31 602 9612
Fax: +82 31 609 7996
info.kr@sarstedt.com, www.sarstedt.com

