


Инструкция по применению

Monovette® для газов крови


1

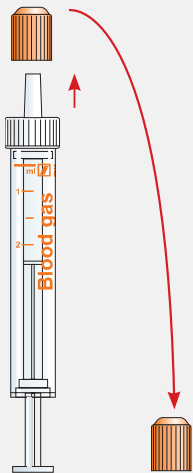

Снимите оранжевый защитный колпачок с Monovette® для газов крови.


Взятие крови с помощью безопасной иглы или иглы Safety-Multifly®

2

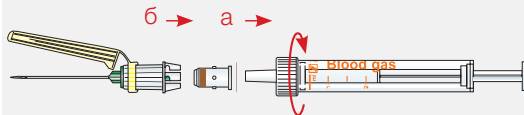

Установите мембранный адаптер (Кат. № 14.1112) на выход типа Луер устройства Monovette® для газов крови (а) и подсоедините к Monovette® для газов крови безопасную иглу (б) или иглу Safety-Multifly®.


3

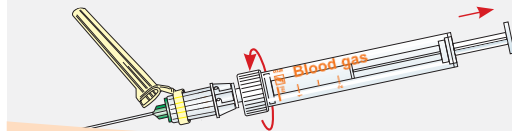

Возьмите пробу крови в соответствии с Вашей рабочей инструкцией.


Взятие крови из сосудистого доступа

2

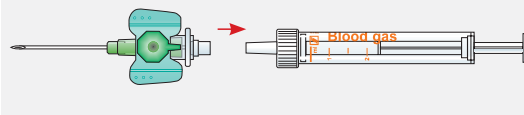

Подсоедините Monovette® для газов крови к сосудистому доступу.


3

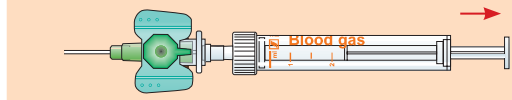

Медленно отводя назад шток поршня, возьмите пробу крови в соответствии с Вашей рабочей инструкцией.

Обработка проб


4

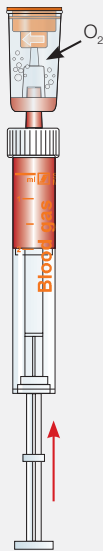

ВАЖНО!

Во избежание ошибок измерения вследствие контаминации воздуха установите воздушный фильтр (Кат. № 14.1148) и удалите воздух, осторожно надавливая на шток поршня снизу вверх.


5

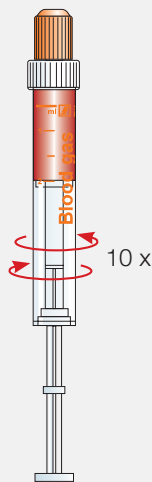

Перемешайте пробу крови сразу после взятия, вращая Monovette® для газов крови между ладонями.

6

0 - 15 мин.

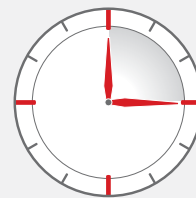

Анализ газов крови желательно проводить сразу – в течение 15 минут – после взятия крови.