

# Stuwband voor Single-Patient Gebruik

Ontworpen om infectieoverdracht te voorkomen



- Patiënt-specifiek maar meerdere keren te gebruiken
- Zeer zacht en latex-vrij materiaal voor optimaal comfort bij de patiënt
- Intuïtief en makkelijk in het gebruik
- Bij zowel volwassenen als kinderen toe te passen

## Kan gemakkelijk worden losgemaakt met één hand

TourniSTRETCH® is ontwikkeld om efficiënte infectiepreventie te bieden.

Gemaakt van een latex-vrij materiaal, de TourniSTRETCH® is sterk en flexibel om een optimale spanning te creëren, maar voelt zacht en comfortabel aan voor de patiënt. Het intuïtieve sluitmechanisme maakt opnieuw aanbrengen en losmaken met één hand mogelijk tijdens bloedafname.



## Gebruiksaanwijzing



Wikkel TourniSTRETCH® rond het ledemaat met het haakje naar boven



Voer het uiteinde door de gesp en creëer voldoende spanning



Trek het uiteinde terug over het haakje om de positie te fixeren



Voor meer informatie  
kijk op

[www.sarstedt.com/tournistretch](http://www.sarstedt.com/tournistretch)

## Bestelgegevens

Artikel nr.	Omschrijving	Verpakking
95.1008	Stuwband TourniSTRETCH® single-patient gebruik	25 stuks / zak 500 stuks / doos

SARSTEDT B.V.  
Penningweg 29  
4879 AE Etten-Leur  
Tel: +31 76 501 75 50  
Fax: +31 76 501 76 26  
info.nl@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

SARSTEDT BV  
Uitbreidingsstraat 84/3  
2600 Berchem  
Tel: +32 3 541 76 92  
Fax: +32 3 541 81 03  
info.be@sarstedt.com  
www.sarstedt.com