

# Torniquete de uso único

Desenvolvido para uma prevenção eficaz contra infecções



- Utilizações variadas no mesmo paciente para proteger contra contaminações cruzadas
- Material muito macio, isento de látex para mais conforto do paciente
- Manuseio simples e intuitivo
- Tamanho adequado tanto para bebês quanto para adultos

## Simplez graças ao manuseio com uma única mão

O TourniSTRETCH® foi desenvolvido para oferecer uma prevenção eficiente contra infecções.

Fabricado em material adaptável, ajuda o usuário com sua elasticidade forte e segura para uma excelente tensão, proporcionando ao paciente uma sensação de suavidade e flexibilidade.

O sistema intuitivo de inserção do torniquete, o reaperto simples e o desprendimento rápido oferecem ao usuário um manuseio simples e permite a utilização com uma única mão na coleta de sangue.



## Manuseio



Coloque o TourniSTRETCH® em volta do braço com o botão virado para cima.



Puxe o torniquete pela fivela e aperte o quanto for necessário.



Puxe a extremidade do torniquete através do botão de fixação para a posição correta e com segurança.



Para mais informações, consulte

[www.sarstedt.com/tournistretch](http://www.sarstedt.com/tournistretch)

## Informação para pedidos

Código	Descrição	Embalagem
95.1008	Torniquete de uso único TourniSTRETCH®	25 und/pacote 500 und/caixa

SARSTEDT Ltda.  
Rodovia Marechal Rondon, km 126  
Soamim  
CEP 18540-000  
Porto Feliz – SP  
Tel: +55 11 4152 2233  
info.br@sarstedt.com  
www.sarstedt.com