

# Персональный жгут для каждого пациента

**НОВИНКА!**



- Возможность многократного использования у одного пациента для защиты от перекрёстной контаминации
- Повышенный комфорт пациента, обеспеченный мягким безлатексным материалом
- Простота и удобство обращения
- Один размер для маленьких детей и взрослых

## Манипуляции со жгутом осуществляются одной рукой

Жгут TourniSTRETCH® предназначен для предотвращения перекрёстного инфицирования пациентов.

Благодаря высокой адаптируемости материала обеспечивает надёжную фиксацию, оптимальное натяжение и одновременно чувство комфорта для пациента.

Система интуитивно понятна в использовании. Жгут легко затягивается и быстро снимается, позволяя эффективно обращаться с ним одной рукой в ходе процедуры взятия крови.



## Способ применения



Обернуть TourniSTRETCH® вокруг руки, крючком вверх



Продеть свободный конец жгута через пряжку и затянуть



Надеть на крючок, чтобы зафиксировать в нужном положении



Более подробная информация приведена на сайте [www.sarstedt.com/tournistretch](http://www.sarstedt.com/tournistretch)

## Информация для заказа

Кат. №	Наименование	Упаковка, шт. в пакете/ коробке
95.1008	Жгут для одного пациента TourniSTRETCH®	25/ 500

SARSTEDT AG & Co. KG  
115093 Москва  
ул. Люсиновская 36 стр. 1  
Тел./факс: +7 (495) 937 52 28  
info.ru@sarstedt.com  
www.sarstedt.com