

Персональный жгут для каждого пациента



- Возможность многократного использования у одного пациента для защиты от перекрёстной контаминации
- Повышенный комфорт пациента, обеспеченный мягким безлатексным материалом
- Простота и удобство обращения
- Один размер для маленьких детей и взрослых

Манипуляции со жгутом осуществляются одной рукой

Жгут TourniSTRETCH® предназначен для предотвращения перекрёстного инфицирования пациентов.

Благодаря высокой адаптируемости материала обеспечивает надёжную фиксацию, оптимальное натяжение и одновременно чувство комфорта для пациента.

Система интуитивно понятна в использовании. Жгут легко затягивается и быстро снимается, позволяя эффективно обращаться с ним одной рукой в ходе процедуры взятия крови.



Способ применения



Обернуть TourniSTRETCH® вокруг руки, крючком вверх



Продеть свободный конец жгута через пряжку и затянуть



Надеть на крючок, чтобы зафиксировать в нужном положении



Более подробная информация приведена на сайте www.sarstedt.com/tournistretch

Информация для заказа

Кат. №	Наименование	Упаковка, шт. в пакете/ коробке
95.1008	Жгут для одного пациента TourniSTRETCH®	25/ 500

ООО «САРШТЕДТ»
198517, Россия,
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, корп. 4, стр.1
Тел: +7 495 937 52 28
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com