

# Eliminação segura com o Multi-Safe twin 500 plus

## Possibilidades de montagem

### Variante A



Colocar a tampa centrada sobre o topo do contentor. Pressionar em simultâneo com ambos os polegares ao lado dos recortes da tampa, até a parte inferior da tampa encaixar de forma audível e visível no rebordo do contentor. (1). Repita este procedimento, ao longo de toda a tampa, para os restantes recortes (2-3).

### Variante B



Coloque a tampa, com a parte de dentro virada para cima, sobre uma superfície firme e assente o rebordo do contentor para cortoperfurantes, em cima da tampa. Pressione firmemente a parte inferior do contentor contra a tampa até ouvir e ver a borda exterior encaixar em todo o seu contorno.

### Tampa diária



Para acionar corretamente a tampa (1) de fecho diário, pressione para baixo o centro da tampa, até o fecho encaixar corretamente.

**Atenção:** ao abrir o fecho diário **não** exercer pressão sobre a tampa de fecho final (2).

### Indicações de segurança

- Não encha acima da linha de enchimento marcada.
- Não empurre os objetos à força para dentro do contentor.
- Não introduza as mãos no contentor.
- Não encha o contentor com líquidos.
- Antes de fechar o contentor, certifique-se de que não existem objetos salientes na abertura.
- Não comprima as paredes do contentor nem o arremesse.

SARSTEDT S.A.  
Sintra Business Park, Edifício 8  
Zona Industrial da Abrunheira  
2710-089 SINTRA  
Tel: +351 21 915 6010  
Fax: +351 21 915 6019  
info.pt@sarstedt.com  
www.sarstedt.com