


Microvette® APT

Automated Processing Tube
Na rutinnú analýzu kapilárnej krvi

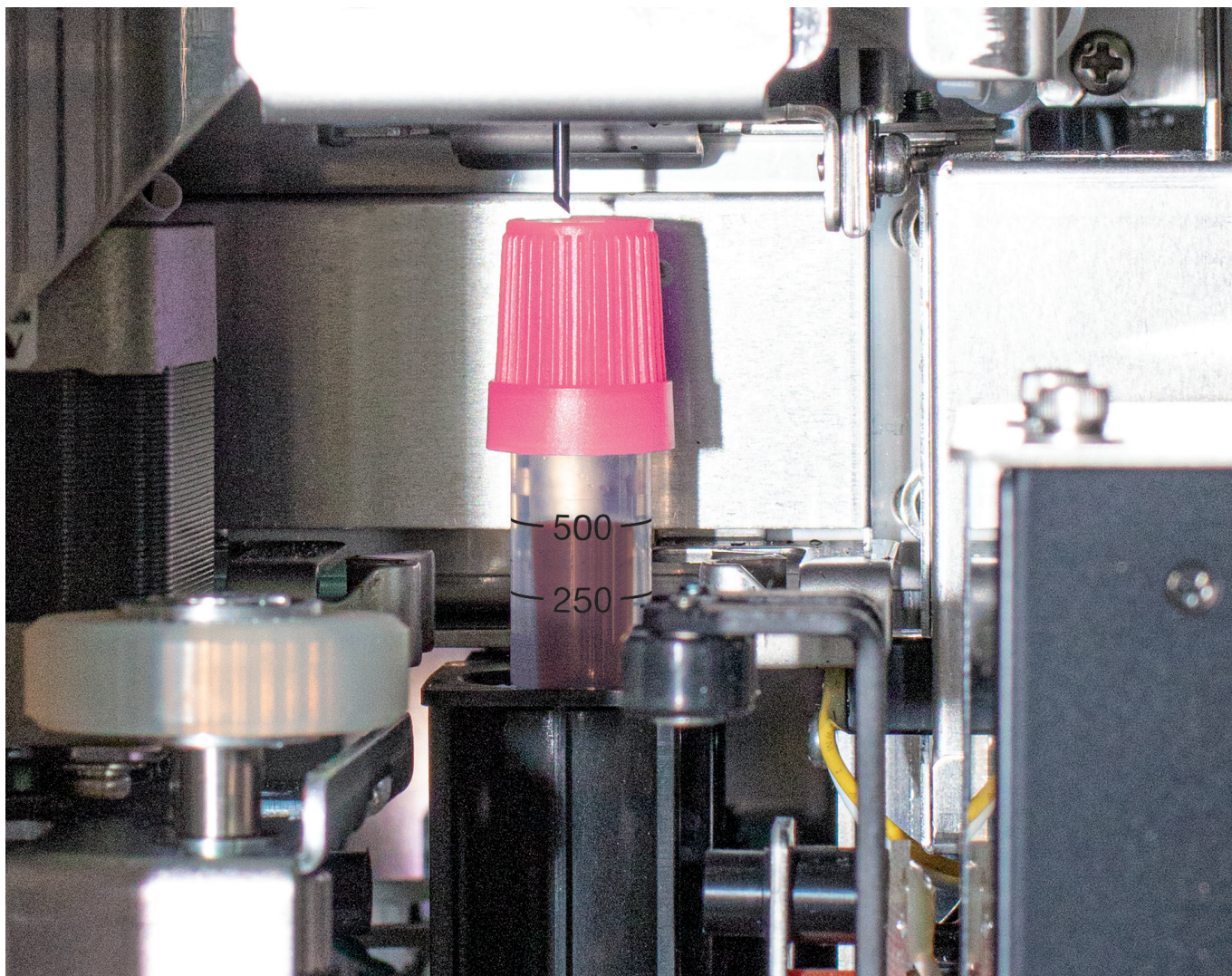

Preanalytika



Microvette® APT – Automated Processing Tube

Najmä ak nie je možný odber venózneho krvi, zvyšuje sa očakávanie od odberu vzoriek kapilárnej krvi od pacientov s ťažkými stavmi žíl, ako sú deti alebo starší ľudia.

Microvette® APT bola špeciálne vyvinutá na automatizované spracovanie v systémoch na analýzu krvného obrazu a spĺňa všetky dôležité požiadavky na primárnu skúmavku, ako napríklad vonkajší rozmer skúmavky 75 x 13 mm.

Kombinácia osvedčeného „know how“ a novo vyvinutého membránového uzáveru umožňuje vytvoriť automatizovaný krvný obraz bez nutnosti manuálnej prípravy vzorky alebo dokonca prerušenia rutinných operácií – rovnako ako pri venózných vzorkách.






VHODNÉ NA BEŽNÉ POUŽÍVANIE

- Automatické spracovanie vzoriek od objemu vzorky 250 µl
- Uzáver s prepichnuteľnou membránou
- Preparácia K₂ EDTA pre 250 – 500 µl kapilárnej krvi



FLEXIBILNÉ

- Kapilára End-to-End (250 µl) pre definovaný objem vzorky
- Obvodový odberový okraj na dobré premiešanie s antikoagulantom
- Priehľadný štítok výrobku na jednoduché posúdenie vzorky

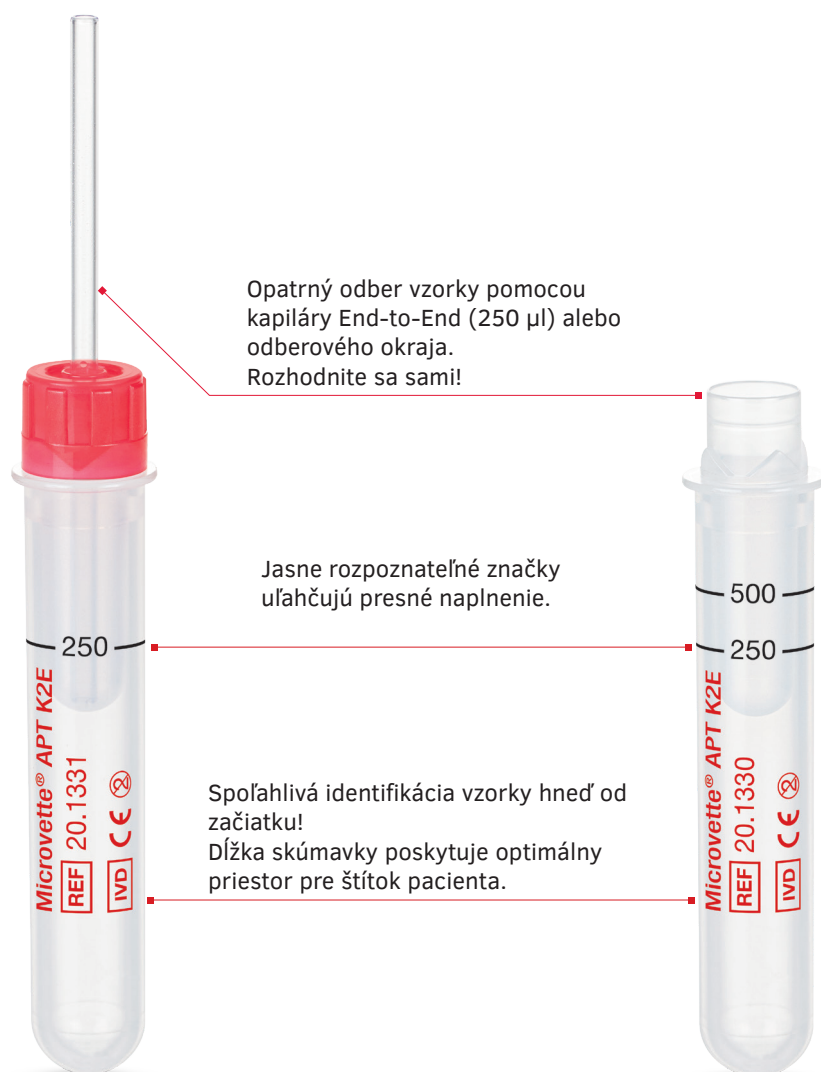

Microvette® APT 250

Microvette® APT 500

Analytika šetriaca čas –

priamo a hygienicky z primárnej skúmavky. Novo vyvinutý membránový uzáver zabezpečuje bezpečnú prepravu a odoslanie vzorky.



Väčšia flexibilita vďaka dvom technikám odberu

Kapilára End-to-End – 250 µl



Microvette® APT 250 má integrovanú kapiláru End-to-End. Vďaka tomu je ideálna na odber 250 µl kapilárnej krvi.

Po úplnom naplnení kapiláry End-to-End možno objem krvi pohodlne a hygienicky preniesť do skúmavky Microvette® APT 250 tak, že sa skúmavka drží v zvislej polohe. Vďaka užívateľsky prívetivému uzáveru je vzorka rýchlo pripravená na prepravu bez rizika úniku vzorky.

Odberový okraj 250 – 500 µl



Microvette® APT 500 má variabilný plniaci objem 250 až 500 µl. Je to ideálna skúmavka na vzorky pre systémy na analýzu krvného obrazu, ktoré vyžadujú objem vzorky 250 až 500 µl.

Odber vzoriek po celom obvode odberového okraja podporuje optimálne premiešanie krvi s antikoagulantom a zabraňuje tvorbe zrazenín.

Vďaka užívateľsky prívetivému uzáveru je vzorka rýchlo pripravená na prepravu bez rizika úniku vzorky.

Rozhodujúca kvapka, keď je dôležité stanoviť zmyslupnú diagnózu pri malom množstve krvi alebo pri ťažkých stavoch žíl.





Bezpečná preprava a predchádzanie preanalytickým chybám

Microvette® APT je vhodná na prepravu najmodernejšími prepravnými systémami a spĺňa požiadavky nariadenia o obaloch P 650 ADR/RID pre primárne skúmvavky.

Použitím rovnakých postupov ako pri bežných venózných vzorkách umožňuje Microvette® APT ľahko minimalizovať zdroje preanalytických chýb počas prepravy a odoslania, ako aj automatizované spracovanie v systémoch na analýzu krvného obrazu.

Použitie Microvette® APT môže tiež zlepšiť celkový čas analýzy (turn around time, TAT) pri analýze kapilárnej krvi a zabrániť opakovanému odberu vzoriek krvi. Pre potreby špeciálnych skupín pacientov.

BEZPEČNE

- > Nepriepustné pre kvapaliny podľa nariadenia o obaloch P 650 ADR/RID
- > Testované pre Tempus600®
- > Vhodné pre potrubnú poštu na rýchlu prepravu



Informácie pre objednávanie

Obj. č.	Objem	Rozmer	Označenie	Farebné označenie	Balenie (IK/UK)
20.1330	250 – 500 µl	75 x 13 mm	Microvette® APT 500 K ₂ E	EÚ	100/500
20.1331	250 µl	75 x 13 mm	Microvette® APT 250 K ₂ E s kapilárou	EÚ	50/500



Ak máte otázky,
radi vám pomôžeme!

Navštívte našu webovú stránku:
www.sarstedt.com

Preamalytic Workflow made by SARSTEDT

Využite synergiu našich
koordinovaných systémov.



SARSTEDT spol. s r. o.

Pri smaltovni 4
851 01 Bratislava

Tel: +421 232 184 930

info.sk@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Objavte 360°
riešenia pre vašu
preanalytiku od
spoločnosti
SARSTEDT:



workflow.sarstedt.com