


Microvette® APT

Automated Processing Tube

Για αναλύσεις ρουτίνας τριχοειδικού δείγματος αίματος



Προανάλυση

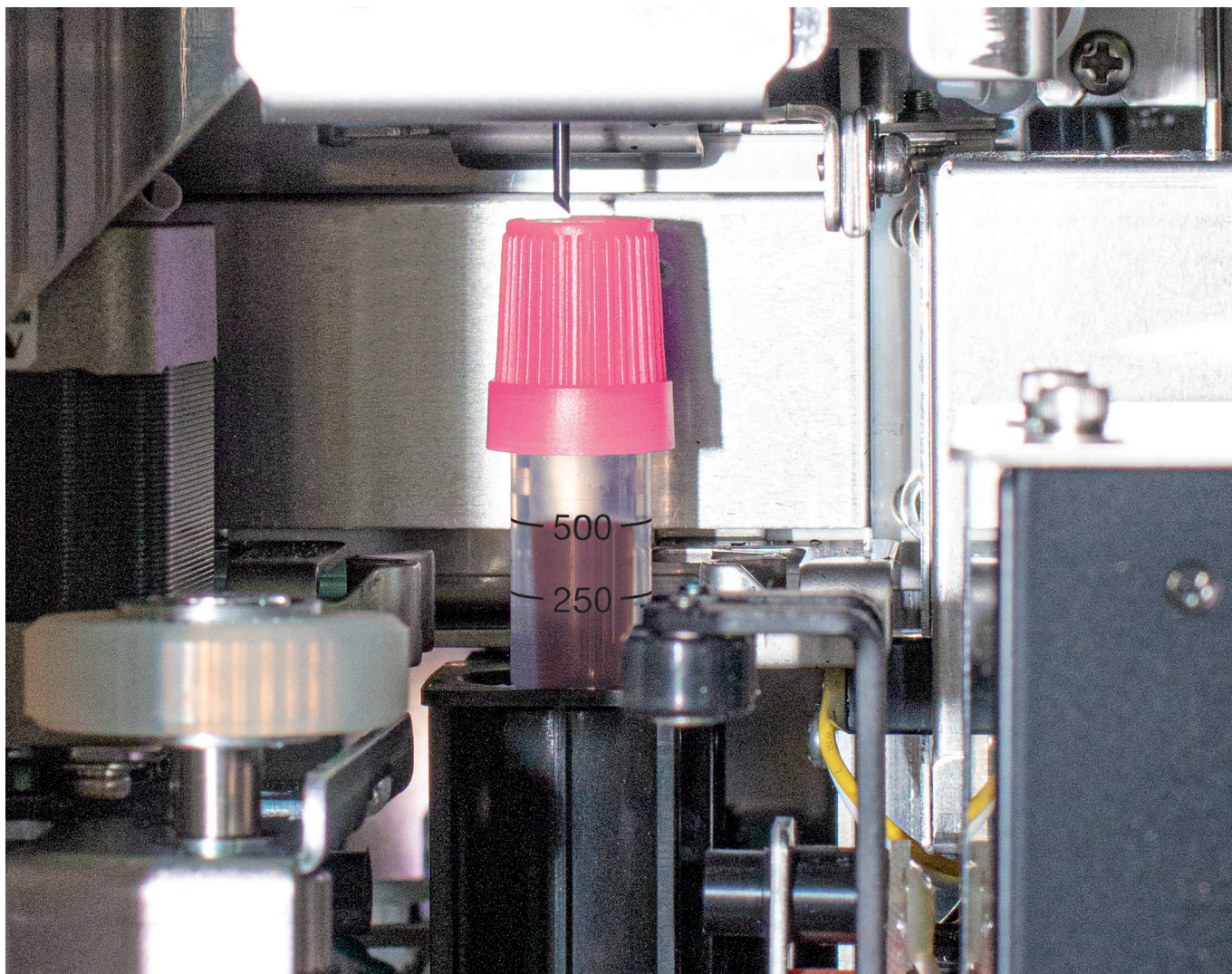

Microvette® APT - Automated Processing Tube

Όταν δεν είναι δυνατή η λήψη φλεβικών δειγμάτων αίματος, είναι πιθανότερο να χρειαστεί να συλλεχθεί τριχοειδικό αίμα από ασθενείς με δύσκολες καταστάσεις φλεβών, όπως παιδιά ή ηλικιωμένοι.

Το Microvette® APT αναπτύχθηκε ειδικά για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία σε αιματολογικούς αναλυτές και πληροί όλες τις σημαντικές απαιτήσεις για ένα κύριο φιαλίδιο, όπως η διάσταση 75 x 13 mm του εξωτερικού σωλήνα.

Ο συνδυασμός της αποδεδειγμένης τεχνογνωσίας και του επανασχεδιασμένου πώματος σφράγισης με τη μεμβράνη διάτρησης επιτρέπει τη δημιουργία μιας αυτοματοποιημένης αιματολογικής εξέτασης χωρίς να απαιτείται η χειροκίνητη προετοιμασία του δείγματος ή ακόμη και η αναγκαστική διακοπή της συνήθους λειτουργίας – όπως ακριβώς συμβαίνει με τα φλεβικά δείγματα.






ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΑ- ΛΥΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ

- Αυτόματη επεξεργασία δείγματος με όγκο από 250 μl και άνω
- Πώμα σφράγισης με μεμβράνη διάτρησης
- Κ₂ EDTA - Παρασκεύασμα για 250-500 μl τριχοειδικού δείγματος αίματος



ΕΥΕΛΙΞΙΑ

- Τριχοειδές End-to-End (250 μl) για καθορισμένο όγκο δείγματος
- Πλήρως περιμετρικό χείλος συλλογής για καλή ανάμειξη με το αντιπηκτικό
- Διαφανής ετικέτα προϊόντος για εύκολη αξιολόγηση του δείγματος

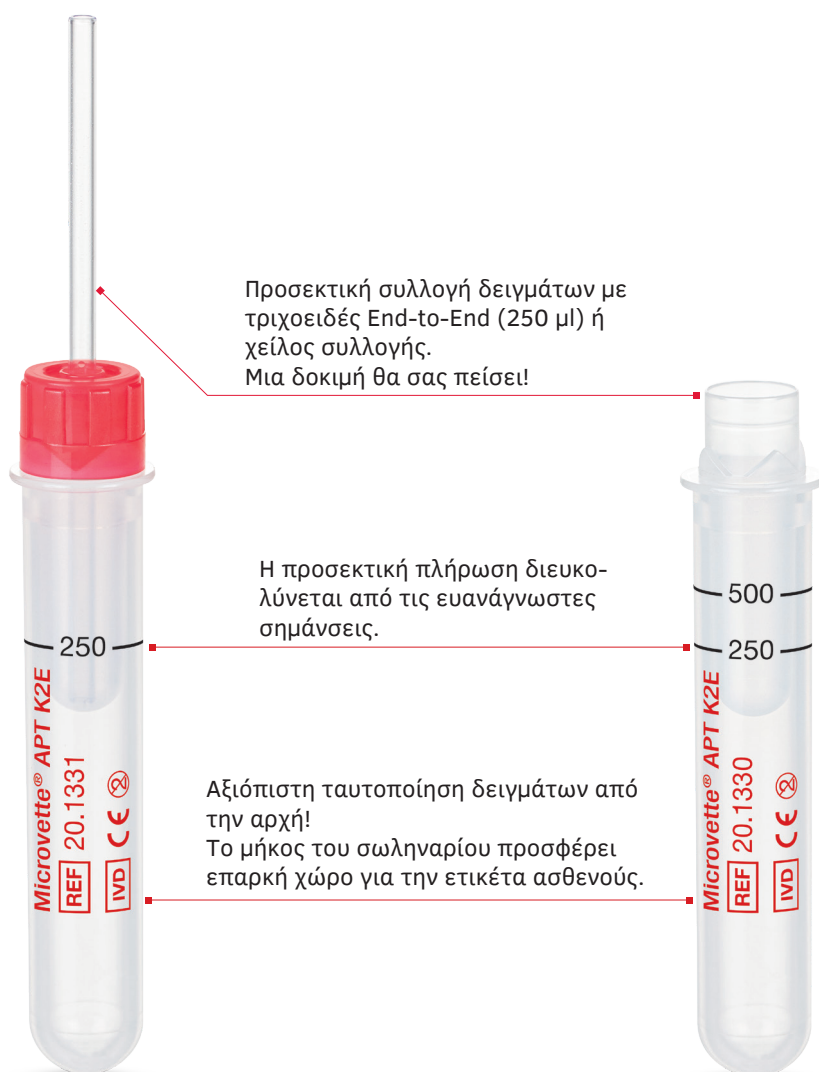

Αναλυτική διαδικασία που εξοικονομεί χρόνο –

απευθείας και με υγιεινό τρόπο από το κύριο φιαλίδιο. Το επανασχεδιασμένο πώμα σφράγισης με τη μεμβράνη διάτρησης εξασφαλίζει ταυτόχρονα την ασφαλή μεταφορά και την ασφαλή αποστολή του δείγματος.



Microvette® APT 250

Microvette® APT 500

Μεγαλύτερη ευελιξία χάρη σε δύο τεχνικές συλλογής

Τριχοειδές End-to-End – 250 μl



Το Microvette® APT 250 διαθέτει ενσωματωμένο τριχοειδές End-to-End. Αυτό το καθιστά ιδανικό για τη συλλογή 250 μl τριχοειδικού δείγματος αίματος. Μόλις γεμίσει πλήρως το τριχοειδές End-to-End, ο όγκος αίματος μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και με υγιεινό τρόπο στο Microvette® APT 250 με το σωληνάριο σε κατακόρυφη θέση. Με το φιλικό προς τη χρήση πώμα, το δείγμα προετοιμάζεται γρήγορα και με ασφάλεια έναντι διαρροής για τη μεταφορά.

Χείλος συλλογής 250 – 500 μl



Το Microvette® APT 500 διαθέτει μεταβλητό όγκο πλήρωσης από 250 έως 500 μl. Είναι το ιδανικό φιαλίδιο δειγμάτων για αιματολογικούς αναλυτές που απαιτούν όγκο δείγματος μεταξύ 250 και 500 μl. Η συλλογή μέσω ολόκληρου του χείλους συλλογής προάγει τη βέλτιστη ανάμειξη αίματος-αντιπηκτικού και αποτρέπει το σχηματισμό πηγμάτων. Με το φιλικό προς τη χρήση πώμα, το δείγμα προετοιμάζεται γρήγορα και με ασφάλεια έναντι διαρροής για τη μεταφορά.

Όταν μόνο μικρές ποσότητες αίματος είναι διαθέσιμες ή η φλεβοκέντηση είναι δύσκολη, κάθε σταγόνα είναι σημαντική για την επίτευξη ακριβούς διάγνωσης.





Ασφαλής μεταφορά και αποφυγή προαναλυτικών σφαλμάτων

Το Microvette® APT ενδείκνυται για μεταφορά με τα πιο σύγχρονα συστήματα μεταφοράς και πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας συσκευασίας P 650 ADR/RID για τα κύρια φιαλίδια.

Χρησιμοποιώντας τις ίδιες διαδικασίες όπως και για τα φλεβικά δείγματα ρουτίνας, το Microvette® APT ελαχιστοποιεί τις αιτίες προαναλυτικών σφαλμάτων κατά τη μεταφορά και αποστολή, καθώς και διευκολύνει την αυτοματοποιημένη επεξεργασία σε αιματολογικούς αναλυτές.

Μέσω της χρήσης του Microvette® APT μπορεί επίσης να βελτιωθεί ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας (Turn-Around-Time - TAT) στις αναλύσεις τριχοειδικών δειγμάτων αίματος και να αποφευχθεί η επαναλαμβανόμενη συλλογή αίματος. Προς όφελος ειδικών ομάδων ασθενών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- > Υδατοστεγές σύμφωνα με την οδηγία συσκευασίας P 650 ADR / RID
- > Ελεγμένο ως προς τη συμβατότητά του με προϊόντα Tempus600®
- > Κατάλληλο για αποστολή σε σωλήνες πεπιεσμένου αέρα για γρήγορη μεταφορά



Πληροφορίες παραγγελίας

Αρ. παραγγελίας	Όγκος	Διαστάσεις	Περιγραφή	Χρωματικός κωδικός	Συσκευασία (ΙΚ/ΥΚ)
20.1330	250 - 500 µl	75 x 13 mm	Microvette® APT 500 K ₂ E	EE	100 / 500
20.1331	250 µl	75 x 13 mm	Microvette® APT 250 K ₂ E με τριχοειδές	EE	50 / 500



Εάν έχετε ερωτήσεις:
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!

Επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο μας στη διεύθυνση:
www.sarstedt.com

Προαναλυτική ροή εργασίας made by SARSTEDT

Επωφεληθείτε από τη συνέργεια των
συγχρονισμένων συστημάτων μας.



SARSTEDT Μ.Ε.Π.Ε.

Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου
190 04 Σπάτα Αττικής

Τηλ. +30 210 6038274
Fax +30 210 6038276

info.gr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Ανακαλύψτε τις
λύσεις 360° της
SARSTEDT για την
προαναλυτική
διαδικασία σας:



workflow.sarstedt.com