

SC 2700

Centrífuga de mesa de alto rendimiento con rotor basculante

¡NUEVA!



- Centrifugado hasta **máx. 2700 g**
- Manejo sencillo gracias a programas preinstalados
- Funcionamiento silencioso y prestaciones de calidad



Centrífuga basculante SC 2700

El funcionamiento extremadamente silencioso (≤ 54 dB[A]) no interfiere en la rutina diaria de la consulta

Pantallas de gran tamaño para el ajuste y la indicación de los valores REALES/NOMINALES y del tiempo de funcionamiento restante

Rotor basculante de 6 posiciones para una capa de separación óptima



Programas preinstalados y un programa de ajuste variable

Información técnica

- Capacidad máx.: 6x10 ml
- ACR máx.: 2.700 g
- RPM máx.: 4310 min⁻¹
- Nivel de ruido máx.: ≤ 54 dB(A)
- Peso: 16,5 kg
- Dimensiones: 430 x 350 x 260 mm (L x A x H)

Alta calidad "Made in Germany" conforme a IvD según la norma (UE) 2017/746

Centrífuga basculante SC 2700

Programas preinstalados para un manejo intuitivo

- Los programas preajustados le permiten centrifugar sangre y orina con los ajustes ideales con solo pulsar un botón. Resulta prácticamente imposible manejar la centrifugadora de forma incorrecta.
- Para sus condiciones de centrifugado individuales dispone de un programa variable. Las revoluciones y el tiempo se ajustan con las teclas "+" y "-"; el control se realiza por medio de las dos pantallas de gran tamaño.

Rotor basculante de hasta 2700 g

- El alto rendimiento de hasta 2.700 g le permite centrifugar los tubos de suero-gel habituales en el mercado en solo 8 minutos. Una importante ventaja temporal de hasta 5 minutos frente a otras centrifugas.
- El rotor basculante de 6 posiciones proporciona una capa de separación horizontal limpia de sus muestras.



Centrifugado de Salivette® para la obtención de saliva.



Centrifugado de S-Monovette® para la obtención de suero / plasma.

Suavidad de marcha elevada

- El funcionamiento silencioso, permite el centrifugado sin interferir en la rutina diaria de la consulta.

Conformidad IvD según la norma (UE) 2017/746

- SC 2700 es sinónimo de máxima precisión, fiabilidad y seguridad.

Fabricación de alta calidad – made in Germany

- La utilización de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil de la centrífuga.

Interfaz de usuario intuitiva

Puede elegir entre 3 ajustes:

- Programa 1: sangre, 2.700 g durante 8 minutos
- Programa 2: orina, 500 g durante 5 minutos
- Programa 3: ajuste variable

Capa de separación óptima gracias al rotor basculante


La centrífuga SC 2700 está especialmente diseñada para el uso en consultas médicas o pequeñas unidades de laboratorio y puede utilizarse para todos los tubos de muestras habituales con una longitud máx. de 100 mm y un diámetro máx. de 18 mm. Gracias al rotor basculante se crea una barrera de gel fiable en los tubos de suero o plasma. Esta barrera de difusión asegura una estabilidad exacta de la muestra.



Centrifugado con rotor basculante (SC 2700)


- Capa de separación gruesa y estable
- Más material disponible para sistemas de análisis

Para la formación óptima de la capa de gel, recomendamos utilizar **rotoros** basculantes para el centrifugado de la S-Monovette®.

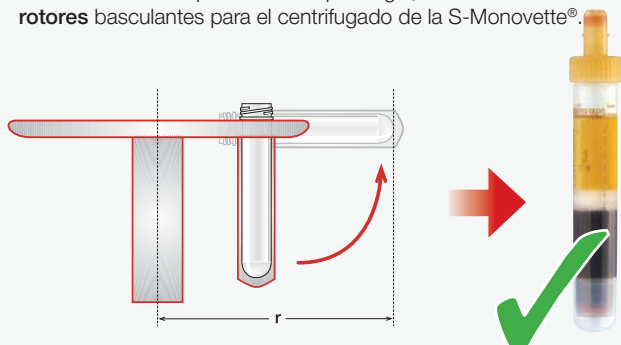

Centrifugado con rotor de ángulo fijo

- Capa de separación fina e inestable
- Menos material disponible para sistemas de análisis

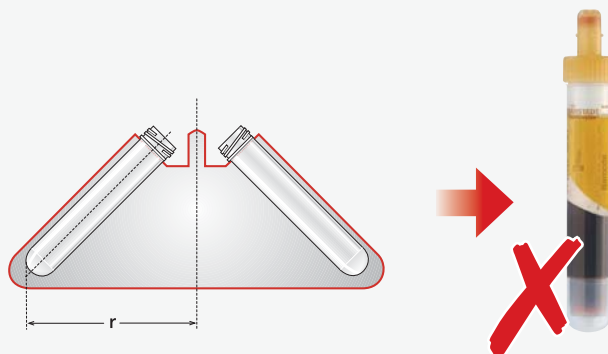

Información

Referencia	Descripción
90.183.000	Centrífuga SC 2700

En el suministro se incluyen el rotor basculante y 6 portatubos para tubos de hasta máx. 100 mm de longitud.

Calculadora para centrifugación:



www.sarstedt.com/service/zentrifugation

SARSTEDT S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriolf
08430 La Roca del Vallès
Tel: +34 93 846 41 03
Fax: +34 93 846 39 78
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com