

SC 2700

Centrífuga de bancada de alto rendimento com rotor basculante

NOVO!



- Centrifugação até um **máx. de 2700 x g**
- Utilização simples com programas pré-instalados
- Alta qualidade e baixo ruído



O baixo ruído (≤ 54 dB(A)) torna-a ideal para o funcionamento diário em consultórios

Visores de grandes dimensões para definição e visualização dos valores NOMINAIS/REAIS, assim como do tempo de funcionamento restante

Câmara do rotor com 6 rotores basculantes para assegurar uma separação perfeita do gel



Programas pré-instalados, assim como um programa ajustável

Elevada qualidade – “made in Germany”, DIV em conformidade com a norma (UE) 2017/746

Informações técnicas

- Capacidade máx.: 6 x 10 ml
- RCF máx.: 2700 x g
- RPM máx.: 4310 rpm
- Nível de ruído máx.: ≤ 54 dB(A)
- Peso: 16,5 kg
- Dimensões: 350x430x260 mm (LxPxA)

Programas pré-instalados para uma utilização intuitiva

- Graças aos programas predefinidos, pode centrifugar sangue e urina com as definições ideais. Os erros de utilização ficam quase completamente excluídos.
- Dispõe de um programa variável para as suas condições de centrifugação individuais. A definição do número de rotações e do tempo é feita com as teclas "+" e "-", e a monitorização é feita através de ecrãs de grandes dimensões.

Rotor basculante com até 2700 x g

- Graças à elevada força centrífuga de até 2700 x g, a centrifugação dos tubos de soro-gel convencionais demora apenas 8 minutos. É até 5 minutos mais rápida do que as centrífugas equiparáveis.
- Os 6 rotores basculantes asseguram uma camada de separação horizontal nítida das suas amostras.



Centrifugação de Salivette para a colheita de saliva.



Centrifugação de S-Monovette para a colheita de soro/plasma.



Baixo ruído

- O baixo ruído permite a centrifugação diária no consultório.

DIV em conformidade com a norma (UE) 2017/746

- A SC 2700 é sinónimo da mais alta precisão, fiabilidade e segurança.

Produção de alta qualidade – made in Germany

- A utilização de materiais de alta qualidade assegura uma longa vida útil da centrífuga.

Painel de comando intuitivo

Pode escolher entre 3 definições:

- Programa 1: Sangue, 2700 x g durante 8 minutos
- Programa 2: Urina, 500 x g durante 5 minutos
- Programa 3: ajustável

Separação ideal graças ao rotor basculante


A centrífuga SC 2700 foi concebida especificamente para ser utilizada em consultórios médicos ou pequenas unidades laboratoriais e é compatível com todos os tubos de amostra comercializados, até um comprimento máx. de 100 mm e um diâmetro máx. de 18 mm. Graças ao rotor basculante fornecido, forma-se uma barreira de gel fiável nos tubos de soro ou plasma. Esta barreira de difusão assegura uma estabilidade precisa da amostra.



Centrifugação com rotor basculante (SC 2700)


- Camada de separação espessa e estável
- Maior disponibilidade de amostra para sistemas de análise

Para o processamento ideal da camada de gel, recomendamos o uso de **rotores basculantes** para a centrifugação de S-Monovette®.

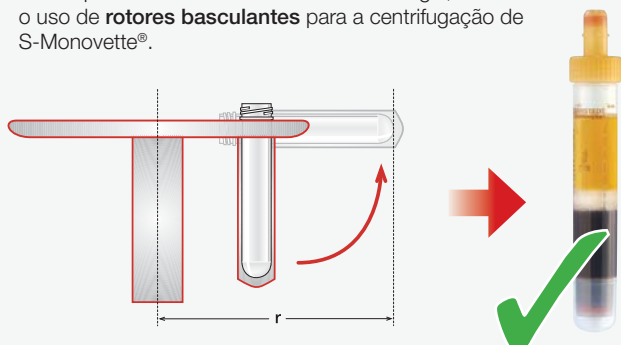

Centrifugação com rotor de ângulo fixo

- Camada de separação fina e instável
- Menor disponibilidade de amostra para sistemas de análise

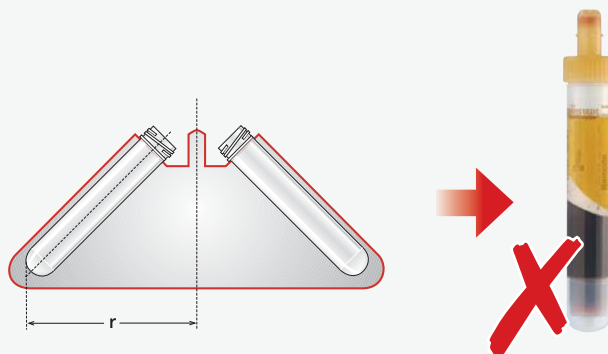

Informações de encomenda

Ref. ^a	Designação
90.183.000	Centrífuga SC 2700

O material fornecido inclui o rotor basculante, assim como 6 suportes para tubos com um comprimento máximo até 100 mm.

Calculadora de centrifugação:



www.sarstedt.com/service/zentrifugation

SARSTEDT S.A.
Sintra Business Park, Edifício 8
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 Sintra
Tel: +351 21 915 6010
Fax: +351 21 915 6019
info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com