

# SC 2700

Wysokowydajna wirówka nablutowa z wirnikiem horyzontalnym



- Wirowanie z przyspieszeniem **max. 2700 x g**
- Prosta obsługa za pomocą fabrycznie zainstalowanych programów
- Wysoka jakość i cichy przebieg pracy



Wirówka pracuje niezwykle cicho ( $\leq 54$  dB(A)), a więc można stosować ją bez żadnych ograniczeń podczas codziennej praktyki

Na dużym wyświetlaczu można ustawiać i wyświetlać wartości ZADANE / BIEŻĄCE oraz pozostały czas pracy

Komora wirnika z 6-miejscowym wirnikiem horyzontalnym zapewnia optymalne oddzielenie warstw



Programy zainstalowane fabrycznie oraz program do dowolnej konfiguracji

Wysoka jakość – „made in Germany”, zgodność IVD zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/746

## Informacje techniczne

- Maks. pojemność: 6x10 ml
- Maks. RCF: 2700xg
- Maks. obr./min.: 4310 min<sup>-1</sup>
- Maks. poziom hałasu:  $\leq 54$  dB(A)
- Masa: 16,5 kg
- Wymiary: 350x430x260 mm (szer. x gł. x wys.)

## Zainstalowane fabrycznie programy do intuicyjnej obsługi

- Dzięki fabrycznie zainstalowanym programom wirowanie krwi i moczu przy idealnych ustawieniach można rozpocząć za naciśnięciem przycisku. Nieprawidłowa obsługa jest niemalże wykluczona.
- Dostępny jest również program umożliwiający wprowadzenie własnych ustawień wirowania. Prędkość obrotową oraz czas wirowania można ustawić za pomocą przycisków „+” oraz „-”. Sterowanie umożliwia duży wyświetlacz.

## Wirnik horyzontalny z przyspieszeniem do 2700 x g

- Dzięki wysokiej mocy aż do 2700 x g możliwe jest wirowanie ogólnodostępnych probówek z żelem separującym surowicę w zaledwie 8 minut. W porównaniu do podobnych wirówek model ten pozwala zaoszczędzić nawet 5 minut.
- 6-miejscowy wirnik horyzontalny zapewnia czystą, horyzontalną warstwę rozdzielającą w probówkach.



Wirowanie probówek Salivette do pobierania śliny.



Wirowanie probówek S-Monovette do pobierania surowicy/osocza.



## Niezwykłe cichy przebieg pracy

- Wirowanie przebiega wyjątkowo cicho, a więc można przeprowadzić je podczas codziennej praktyki bez żadnych zakłóceń.

## Zgodność IVD zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/746

- SC 2700 wyróżnia się wysoką precyzją, niezawodnością i bezpieczeństwem.

## Wysokiej jakości wykonanie – made in Germany

- Wykonanie z wysokiej jakości materiałów przekłada się na długą żywotność wirówki.

## Intuicyjny interfejs użytkownika

Do wyboru dostępne są 3 ustawienia:

- Program 1: krew, 2700 x g przez 8 minut
- Program 2: mocz, 500 x g przez 5 minut
- Program 3: różne ustawienia

# Wirówka horyzontalna SC 2700



## Doskonale oddzielone warstwy dzięki wirnikowi horyzontalnemu

Wirówka SC 2700 została zaprojektowana specjalnie z myślą o użytku w gabinetach lekarskich lub małych laboratoriach i może być używana ze wszystkimi powszechnie stosowanymi probówkami o maksymalnej długości 100 mm i maksymalnej średnicy 18 mm. Dzięki dołączonemu wirnikowi horyzontalnemu w probówkach z surowicą lub osoczem tworzy się niezawodna bariera żelowa. Tak powstała bariera dyfuzyjna zapewnia doskonałą stabilność próbki.

Kalkulator wirowania:




[www.sarstedt.com/service/zentrifugation](http://www.sarstedt.com/service/zentrifugation)

### Wirowanie z wirnikiem horyzontalnym (SC 2700)


- Warstwa oddzielająca jest gruba i stabilna
- Więcej materiału dostępnego dla systemów analitycznych

Aby zagwarantować utworzenie optymalnej warstwy żelu, do wirowania S-Monovette® zalecamy stosowanie **wirników horyzontalnych**.

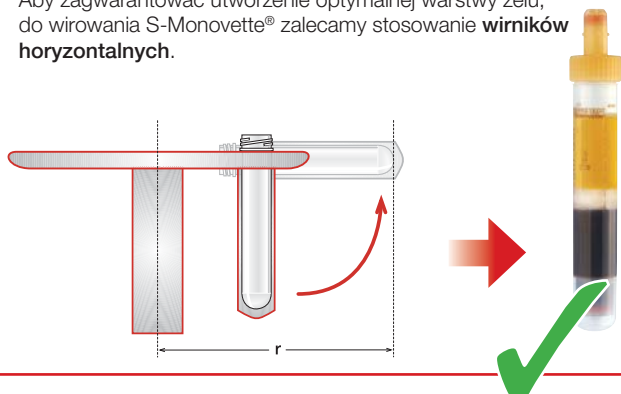

### Wirowanie z wirnikiem kątowym


- Warstwa oddzielająca jest cienka i niestabilna
- Mniej materiału dostępnego dla systemów analitycznych

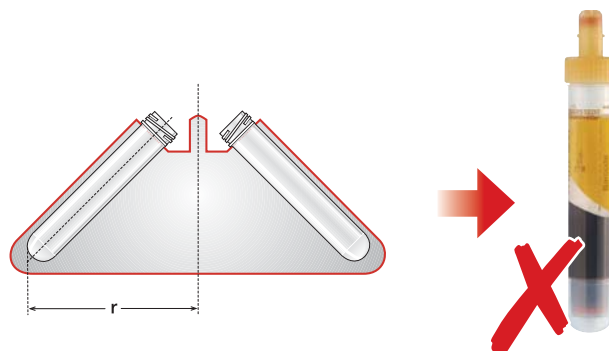

### Szczegóły zamówienia

| Nr zam.    | Oznaczenie                                    | Zakres dostawy                                               |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 90.183.000 | Wirówka SC 2700                               | Wirówka, zasilacz, wirnik horyzontalny, 6 uchwytów na próbki |
| 90.183.100 | Uchwyt na próbki SC 2700 o długości do 100 mm | 2 szt. / worek                                               |
| 90.183.200 | Adapter do wirowania krótkich probówek        | 2 szt. / worek                                               |
| 90.183.300 | Wirnik horyzontalny z uchwytem na próbki      | Wirnik horyzontalny, 6 uchwytów na próbki                    |

Odkryj kompleksowe rozwiązania 360° z zakresu preanalitiky firmy SARSTEDT

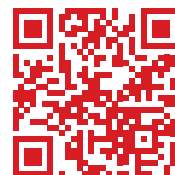

[workflow.sarstedt.com](http://workflow.sarstedt.com)

SARSTEDT Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 25  
Blizne Łaszczyńskiego  
05-082 Stare Babice  
Tel: +48 22 722 05 43  
Fax: +48 22 722 07 95  
[info.pl@sarstedt.com](mailto:info.pl@sarstedt.com)  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

 **SARSTEDT**