

*To make your
workflow excellent.*



Urindrainage

Produktlösungen für die individuelle Patientenversorgung



A06 W



DEHP frei



- Nadelfreie, flache Entnahmestelle
- Anschluss des Wechselbeutels mit Bajonett-Verschluss
- Universeller Einsatz durch Haltebänder und Befestigungshaken
- Wechselbeutel mit 2.000 ml und 3.000 ml Fassungsvermögen erhältlich

Das System, wenn präzises ablesen erforderlich ist

Die präzise, leicht ablesbare Graduierung ermöglicht eine Milliliter genaue Erfassung von Kleinstmengen. Das Gesamtmessvolumen von 500 ml sowie die übersichtliche und klare Graduierung erlauben exakte Bilanzierung auch bei hohen Ausscheidungsraten. Mengen über 500 ml werden automatisch durch den Überlauf in den gut ablesbaren Auffangbeutel geleitet.

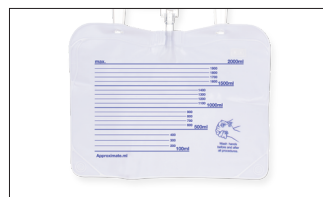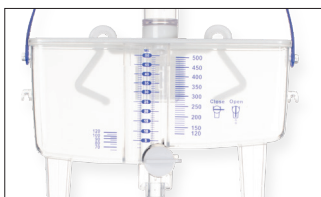

Nadelfreie Probenentnahme




Flache Entnahmestelle zur sicheren Desinfektion und Probenentnahme.



Hygienische & benutzerfreundliche

Handhabung des Wechselbeutels

Der Bajonett-Verschluss ermöglicht ein schnelles und hygienisches Wechseln sowie einen sicheren Anschluss an die Messkammer.

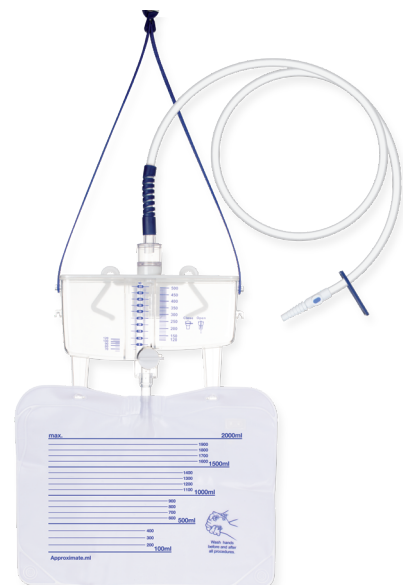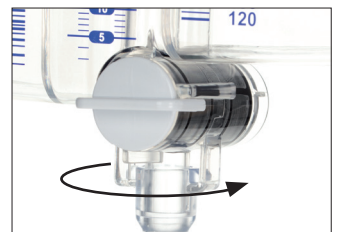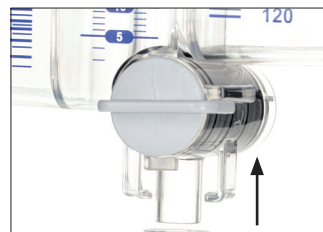

UD 3plus

DEHP frei




- Nadelfreie, flache Entnahmestelle
- Großer Doppelhaken
- 2 Schlauchlängen: 100 cm und 120 cm
- 2.000 ml Fassungsvermögen

Das System für den immobilen Patienten

Geschlossenes Drainage-System für die hygienische Versorgung von Katheträgern mit dauerhafter Bettlägerigkeit.

Großer Doppelhaken

Der große Doppelhaken ermöglicht leichtes und sicheres Anbringen an den Bettenholmen.

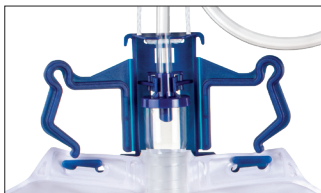

Nadelfreie Probenentnahme


Flache Entnahmestelle zur sicheren Desinfektion und Probenahme.



Tropfkammer

Mit hydrophober Belüftungsfläche für optimalen Druckausgleich und Ablaufverhalten des Urins. Die Tropfkammer ermöglicht besten Schutz vor ascendierender Keimwanderung.

Das horizontal angeordnete Membran-Rückschlagventil gewährleistet optimales Öffnungsverhalten bei kleinsten sowie größten Urinabflussmengen und verhindert den Urinrückfluss unabhängig von der Lage des Beutels.

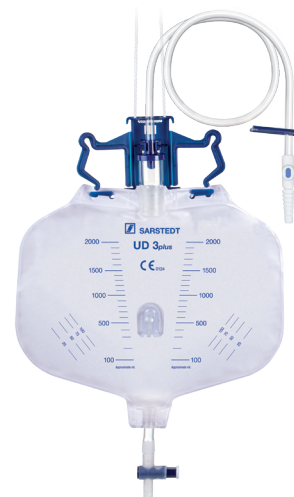

TUR-BAG

DEHP frei



- Nadelfreie, flache Entnahmestelle
- Mit und ohne Pumpball erhältlich
- 4.000 ml Fassungsvermögen

Der Beutel für die Blasenspülung

Ein geschlossenes Urindrainage-System für die postoperative Blasenspülung.

Pumpball

Mit Pumpball zur kontrollierten postoperativen Blasenspülung, insbesondere nach Prostataresektion.



Nadelfreie Probenentnahme

Flache Entnahmestelle zur sicheren Desinfektion und Probenentnahme.



Drainagebeutel

DEHP frei



- Universeller Stufenkonnektor mit integrierter Durchstechmembrane zur Urinprobenabnahme
- Großlumiger, knickstabiler Drainageschlauch bietet optimalen Harnfluss
- 2.000 ml Fassungsvermögen

Optimale Patientenversorgung mit dem Drainagebeutel

Der Drainagebeutel zeichnet sich durch eine extra starke Folie und eine bakteriendichte, hydrophobe Beutelbelüftung aus. Dies bietet sich vor allem bei Kurzzeitkatheterisierung an.

T-Tap Ablasshahn

Praktische Einhandbedienung und effektiver Schutz vor Kontamination



Nadelfreie Probenentnahme

Flache Entnahmestelle zur sicheren Desinfektion und Probennahme.



UroStretch



- Keinerlei Kontakt des Beinbeutels mit der Haut
- Fixierung des Beutels über die gesamte Fläche
- Dämpfung von Flüssigkeitsgeräuschen

UroStretch Beinbeutel-Befestigung

Die elastische, textile Schlauchbandage zur Beinbeutelfixierung. Einsetzbar bei allen Urin-Beinbeuteln bis 750 ml Füllvolumen. Der UroStretch ist mehrmals verwendbar, waschbar (40 °C) und bietet einen hohen Tragekomfort.



Bestellinformationen

Urinmesssystem A06 W

Beschreibung	Verpackung	Bestell-Nr.
Urinmesssystem A06 W 500 ml mit beiliegendem 2,0 l Wechselbeutel ohne Ablasshahn mit Haltebändern und Befestigungshaken, einzeln steril verpackt	10	74.5681.200
Wechselbeutel 2,0 l für A06 W ohne Ablasshahn, einzeln steril verpackt	50	74.5684.001
Wechselbeutel 2,0 l für A06 W mit Ablasshahn, einzeln steril verpackt	50	74.5684.002
Wechselbeutel 3,0 l für A06 W ohne Ablasshahn, einzeln steril verpackt	50	74.5685.001
Wechselbeutel 3,0 l für A06 W mit Ablasshahn, einzeln steril verpackt	50	74.5685.002

UD 3plus

Beschreibung	Verpackung	Bestell-Nr.
UD 3plus Urindrainage-System 2,0 l, mit Doppelhaken, Schlauchlänge 100 cm, einzeln steril verpackt	20	74.5330.500
UD 3plus Urindrainage-System 2,0 l, mit Doppelhaken, Schlauchlänge 120 cm, einzeln steril verpackt	20	74.5330.520

TUR-BAG

Beschreibung	Verpackung	Bestell-Nr.
TUR-BAG 4,0 l mit Pumpball, Schlauchlänge 100 cm, einzeln steril verpackt	10	74.5340.500
TUR-BAG 4,0 l ohne Pumpball, Schlauchlänge 100 cm, einzeln steril verpackt	20	74.5340.501

Drainagebeutel

Beschreibung	Verpackung	Bestell-Nr.
Urin-Drainagebeutel 2,0 l, mit Folienrückschlagventil, T-Tap Ventil, Schlauchlänge 100 cm, einzeln steril verpackt	50	74.5485.005

Beinbeutelbefestigung

Beschreibung	Verpackung	Bestell-Nr.
UroStretch, Größe S	10	74.5767.001
UroStretch, Größe M	10	74.5767.002
UroStretch, Größe L	10	74.5767.003
UroStretch, Größe XL	10	74.5767.004

Wenn Sie Fragen haben:
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Besuchen Sie auch unsere Internetseite:
www.sarstedt.com

SARSTEDT AG & Co. KG

Sarstedtstraße 1
D-51588 Nümbrecht

Telefon: +49 2293 305 0

Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0

info@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Weitere Informationen,
Videos und Musterbestellung:
sarstedt.com