


## Comment coller correctement une étiquette code-barres sur une S-Monovette® pourvue d'une étiquette en plastique transparente

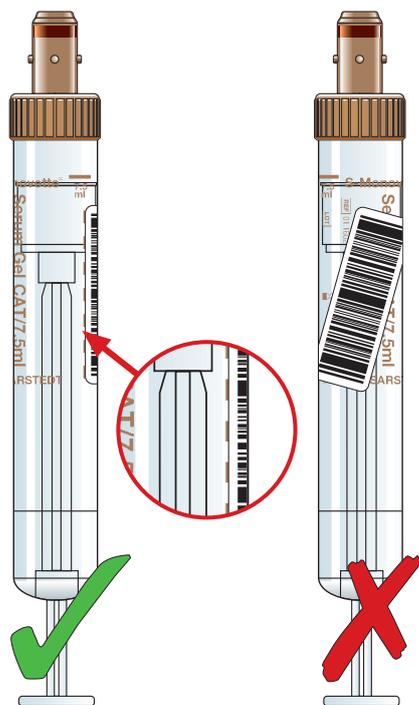

Correct

Incorrect

- Collez l'étiquette code-barres **le long de la ligne pointillée** de l'étiquette en plastique de la S-Monovette®
- Ne collez pas l'étiquette de code-barres **de biais ou autour du tube**

Les récipients pour échantillons pourvus d'une étiquette en plastique sont correctement étiquetés lorsque :

- L'étiquette code-barres a été collée le long de la ligne pointillée de l'étiquette en plastique de la S-Monovette®.
- Le contenu est bien visible.
- Il est possible de contrôler le niveau de remplissage. L'étiquette doit donc être appliquée en dessous du repère de remplissage.
- Le bouchon à vis peut être retiré sans difficulté.
- Le tube et l'étiquette ne se coincent pas et ne se collent pas dans la centrifugeuse.



## Comment coller correctement une étiquette code-barres sur une S-Monovette® pourvue d'une étiquette en papier



Correct

Incorrect

- Collez l'étiquette code-barres **sur** l'étiquette en papier existante de la S-Monovette®. L'inscription de la préparation doit se trouver à droite de l'étiquette code-barres.
- Ne collez **pas** l'étiquette de code-barres à **côté** de l'étiquette en papier, car la zone de visualisation de l'échantillon doit rester dégagée pour permettre le contrôle visuel.

Les récipients pour échantillons pourvus d'une étiquette en papier sont correctement étiquetés lorsque :

- L'étiquette code-barres a été collée sur l'étiquette en papier existante de la S-Monovette®.
- Le contenu est bien visible.
- Il est possible de contrôler le niveau de remplissage.
- Le bouchon à vis peut être retiré sans difficulté.
- Le tube et l'étiquette ne se coincent pas et ne se collent pas dans la centrifugeuse.



SARSTEDT S.A.R.L.  
Route de Gray  
Z.I. des Plantes  
70150 Marnay  
Tel: +33 384 31 95 95  
Fax: +33 384 31 95 99  
info.fr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**