


Pegado correcto de una etiqueta con código de barras en una S-Monovette® con etiqueta de plástico transparente

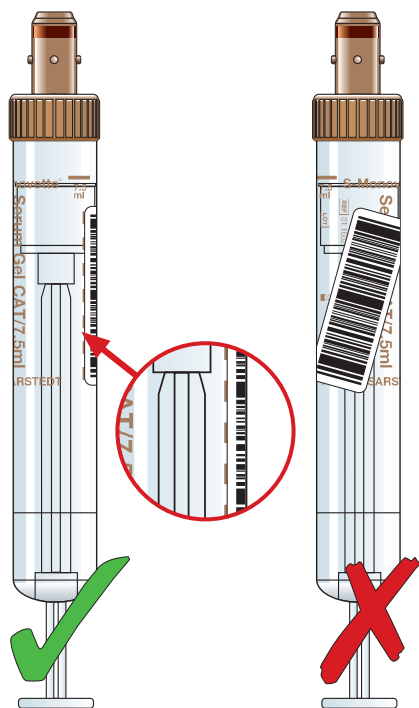

Correcto

Incorrecto

- Pegue la etiqueta del código de barras **sobre la línea de puntos** de la etiqueta de plástico de la S-Monovette®
- No pegue la etiqueta del código de barras **en diagonal ni rodeándola**

Los recipientes para muestras con etiquetas de plástico están etiquetados correctamente si:

- La etiqueta del código de barras se ha pegado sobre la línea de puntos de la etiqueta de plástico de la S-Monovette®
- Se garantiza una visión clara del contenido.
- Se puede controlar el nivel de llenado. Por lo tanto, adhiera la etiqueta por debajo de la marca de llenado.
- El tapón de rosca puede retirarse sin problemas.
- El tubo y la etiqueta no se atascan ni se queda adheridos a la centrifuga.



Pegado correcto de una etiqueta con código de barras en una S-Monovette® con etiqueta de papel




Correcto

Incorrecto

- Pegue la etiqueta del código de barras a ras **sobre la** etiqueta de papel existente de la S-Monovette®. La rotulación de la preparación queda entonces a la derecha de la etiqueta del código de barras.
- No pegue la etiqueta del código de barras **junto a** la etiqueta de papel, ya que el campo de visión sobre la muestra debe quedar libre para el control visual.

Los recipientes para muestras con etiquetas de papel están etiquetados correctamente si:

- La etiqueta del código de barras se ha pegado a ras sobre la etiqueta de papel existente de la S-Monovette®.
- Se garantiza una visión clara del contenido.
- Se puede controlar el nivel de llenado.
- El tapón de rosca puede retirarse sin problemas.
- El tubo y la etiqueta no se atascan ni se queda adheridos a la centrífuga.

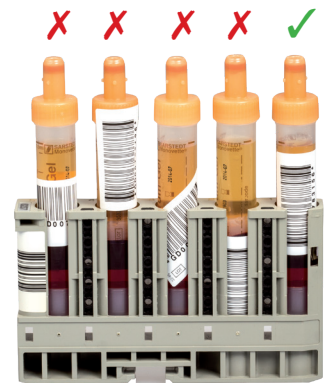

SARSTEDT S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valloriolf
08430 La Roca del Vallès
Tel: +34 93 846 41 03
Fax: +34 93 846 39 78
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com