


## Как правильно наклеить этикетку со штрихкодом на пробирку S-Monovette® с прозрачной пластиковой этикеткой

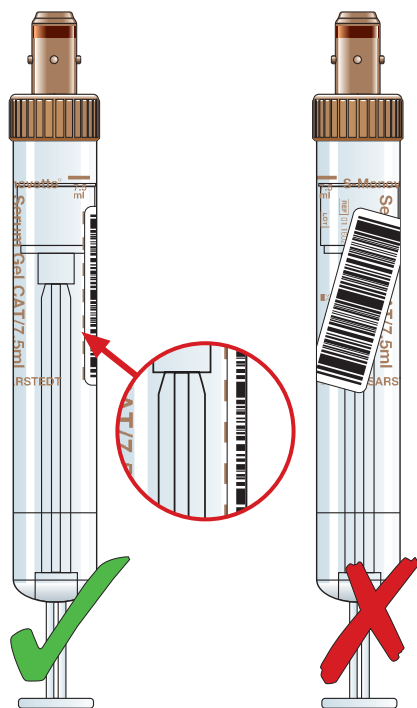

Правильно

Неправильно

- Этикетку со штрихкодом необходимо наклеивать **вдоль пунктирной линии** пластиковой этикетки пробирки S-Monovette®
- Не наклеивайте этикетку со штрихкодом **по диагонали или по кругу**

Правильная маркировка пробирок с пластиковой этикеткой предполагает соблюдение следующих правил:

- Этикетка со штрихкодом наклеена вдоль пунктирной линии пластиковой этикетки пробирки S-Monovette®.
- Содержимое пробирки хорошо просматривается.
- Пользователь может без труда проверить уровень заполнения пробирки. Поэтому этикетку следует наклеивать ниже линии заполнения.
- Снятие завинчивающейся крышки не вызывает сложностей.
- Пробирка и этикетка не застревают и не цепляются друг за друга при обработке в центрифуге.



# Как правильно наклеить этикетку со штрихкодом на пробирку S-Monovette® с бумажной этикеткой



Правильно

Неправильно

- Этикетку со штрихкодом необходимо наклеивать **на одном уровне с** имеющейся бумажной этикеткой пробирки S-Monovette®. В этом случае наименование содержимого пробирки будет располагаться справа от этикетки со штрихкодом.
- Не стоит наклеивать этикетку со штрихкодом **рядом** с бумажной этикеткой, поскольку ничего не должно препятствовать обзору пробы для возможности ее визуального контроля.

Правильная маркировка пробирок с бумажной этикеткой предполагает соблюдение следующих правил:

- Этикетка со штрихкодом наклеена на одном уровне с имеющейся бумажной этикеткой пробирки S-Monovette®.
- Содержимое пробирки хорошо просматривается.
- Пользователь может без труда проверить уровень заполнения пробирки.
- Снятие завинчивающейся крышки не вызывает сложностей.
- Пробирка и этикетка не застревают и не цепляются друг за друга при обработке в центрифуге.



ООО «САРШТЕДТ»  
198517, Россия,  
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,  
ул. Новые Заводы, д. 58, корп. 4, стр. 1  
Тел: +7 495 937 52 28  
info.ru@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

 SARSTEDT