

Bezpečnostní výrobky

S námi jste již nyní na bezpečné straně!

Nově!



11. května 2013:
Prosazení směrnice EU
2010/32/EU do národního práva

Chraňte sebe a své pacienty

...s komplexním bezpečnostním řešením
odběru krve od společnosti SARSTEDT



EU-směrnice k zabránění poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních

Nabytím platnosti směrnice EU 2010/32/EU* k zabránění poranění ostrými/špičatými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních dne 11. května 2013 na národní úrovni má být vytvořeno co možná nejbezpečnější pracovní prostředí pro zaměstnance zdravotnictví. Zaměstnanci zdravotnického sektoru jsou vystaveni riziku zranění píchnutím jehlou nebo ostrými/špičatými předměty. Zaměstnanci se mohou infikovat krví přenosnými choroboplodnými zárodky (viry, bakteriemi, plísněmi a jinými mikroorganismy). Nejrozšířenější viry jsou sice HIV, hepatitida B (HBV) a C (HCV), existuje avšak více než 20 krví přenosných nemocí.

Mimo jiné budou požadovány následující preventivní a ochranná opatření:

- zabránění zbytečného používání ostrých/špičatých předmětů
- příprava lékařských pomůcek s integrovanými bezpečnostními a ochrannými mechanismy
- zavedení bezpečných pracovních pravidel
- prosazení bezpečného postupu při zacházení s ostrými/špičatými předměty a jejich likvidaci
- zákaz opětovného nasazení ochranného krytu na použitou jehlu
- použití osobních ochranných prostředků

Publikace

- Případová studie: Needlestick – how to prevent needlestick injuries, EU-OSHA –European Agency for Safety and Health at Work, zdroj: http://osha.europa.eu/data/case-studies/needlestick_2014-howto-preventneedlestick-injuries-effectively
- E-Facts 40: zhodnocení nebezpečí poranění a ohrožení poranění bodnutím jehlou, EU-OSHA-European Agency for Safety and Health at Work, zdroj: <http://osha.europa.eu/de/publications/e-facts/efect40>
- NHS informace, zdroj: http://www.nhsemployers.org/EmploymentPolicyAndPractice/European_employment_policy/Pages/Initiatives-On-Needlestick-Injuries.aspx

Bezpečnostní jehla – bezpečnost při rutinním odběru krve



Předmontovaný systém

Bezpečnostní jehla je vždy připravena k použití a nemusí být namontována na držák jehly.



Bezpečná punkce

...díky plochému úhlu vpichu vhodná také u špatně viditelných žil

Bezpečná ochrana jehly


Speciální ochrana bezpečnostní jehly poskytuje uživateli bezpečné ukončení odběru krve díky zasunutí jehly do ochranného pouzdra jehly. Následné znehodnocení se provede odevzdáním do vhodného boxu pro likvidaci.



Safety-Multifly® - bezpečnost při obtížném zavedení jehly do žil

Ochrana jehly - obsluha jednou rukou, předmontovaný adaptér, optimální balení & materiál

Obsluha ochrany jehly Safety-Multifly® je možná jednou rukou a proto nabízí maximální pracovní komfort. Adaptér Safety-Multifly®-jehly je již namontovaný a tvoří jednotku připravenou k použití. Balení a hadičky Safety-Multifly®-jehly jsou přizpůsobeny potřebám odběru krve a pozdějšímu jednoduchému vložení do boxu určeného pro likvidaci těchto předmětů.

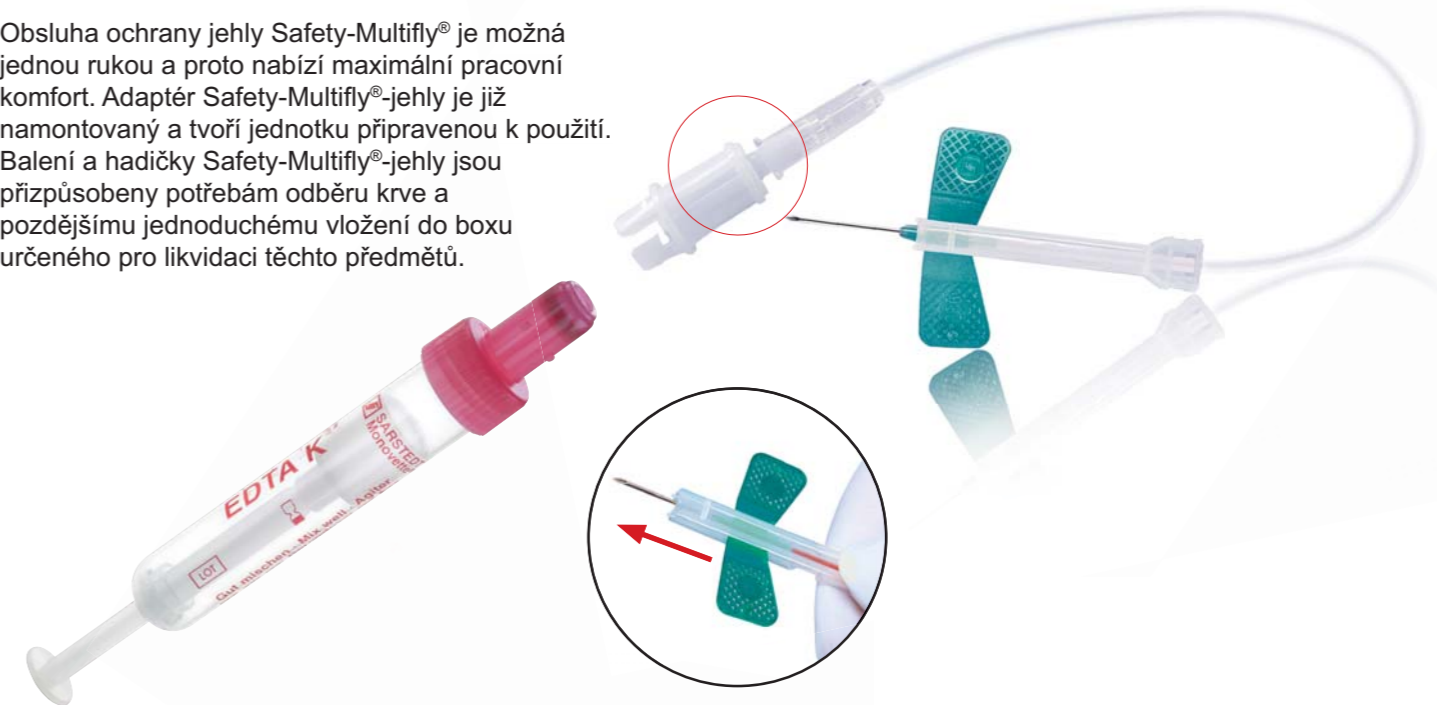

Bezpečnostní lanceta - pro bezpečnou, pohodlnou a šetrnou punkci

- sterilní jednorázový výrobek zabraňuje poranění bodnutím jehlou, protože se jehla a čepel nachází před a po použití vždy v bezpečném pouzdru lancety.
- výběr různých velikostí jehel a čepelí s různými hloubkami vpichu pro punkci prstu, ušního lalůčku nebo paty
- jednoduchá manipulace díky předpjatému systému, jednoduché sejmutí ochranného víčka jehly a zmáčknutí spouštěcího tlačítka
- různé možnosti držení díky ergonomickému tvaru a vrubům na rýhovaném pouzdrě lancety





Multi-Safe sběrný box na likvidaci

- bezpečná a pro uživatele komfortní likvidace ostrých a špičatých předmětů
- plnicí otvor může být postupně zvětšen vylomením 2 klapků z víčka
- univerzální stahovací zařízení pro (Luer-) jehly a inzulínová pera

Náš servis – Vaše výhoda



Naši kvalifikovaní poradci Vám rádi poradí přímo u Vás na pracovišti. Rádi si na Vás uděláme čas a zodpovíme všechny Vaše dotazy. Díky našemu školení Vám poskytneme nutnou jistotu a podpoříme Vás při zapracování nových spolupracovníků.



Pod pojmem **servis a partnerství** rozumíme také přímou podporu všech Vašich spolupracovníků, kteří mají denně zacházet nebo budou v budoucnu zacházet s našimi výrobky.

SARSTEDT spol. s.r.o.
Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9
Tel. 281 021 491
281 021 492
Fax 226 001 045
info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com