
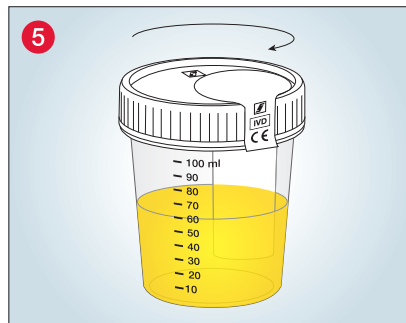
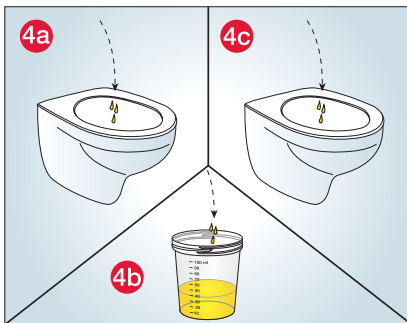
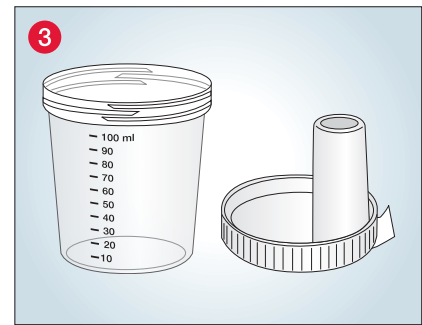
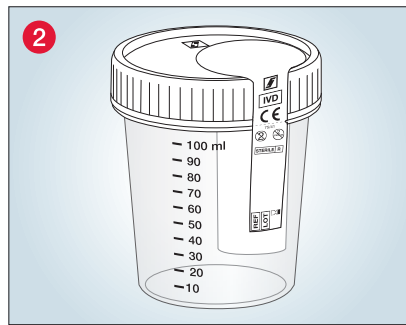


Handhabungshinweis

Sammeln von Mittelstrahlurin mit dem Urin-Becher NFT

Anleitung für Patienten

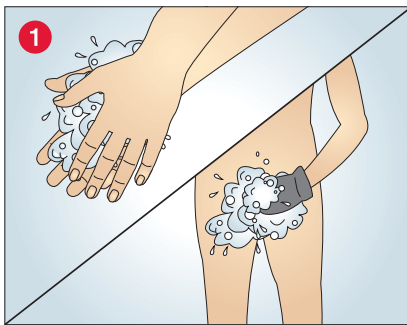

- 1 Reinigen Sie gründlich Ihre Hände und anschließend den Genitalbereich. Trocknen Sie sich mit einem sauberen Tuch ab.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitsetikett unbeschädigt ist.
- 3 Öffnen Sie dann den Deckel des Urin-Bechers NFT, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Legen Sie den Deckel an einem hygienischen Ort ab. Stellen Sie sicher, dass die Innenseite des Deckels nicht kontaminiert wird.
- 4 Geben Sie zunächst eine kleine Menge Urin in die Toilette ab (Abb. 4a) und fangen dann, ohne den Urinstrahl zu unterbrechen, den Mittelstrahlurin in den Urin-Becher NFT auf (Abb. 4b). Entleeren Sie die Blase anschließend vollständig in die Toilette (Abb. 4c).
- 5 Verschließen Sie den Deckel des Urin-Bechers NFT fest, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn zudrehen. Achten Sie darauf, die Innenseite des Deckels nicht zu kontaminieren. Kennzeichnen Sie den Urin-Becher NFT mit ihrem Namen und geben Sie den fest verschlossenen Urin-Becher NFT mit der Probe sofort bei der zuständigen Person ab oder verfahren Sie entsprechend der Anweisung Ihres Arztes.