
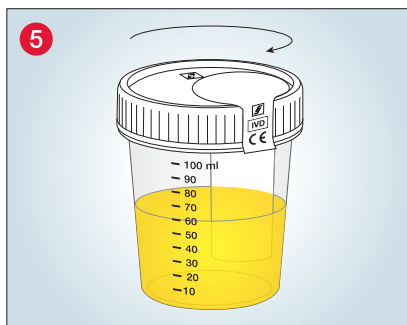
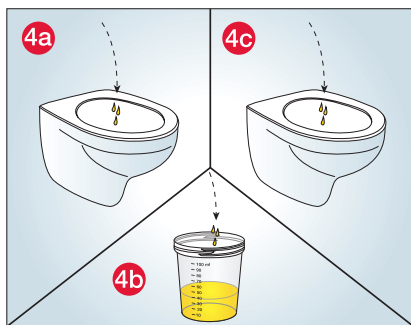
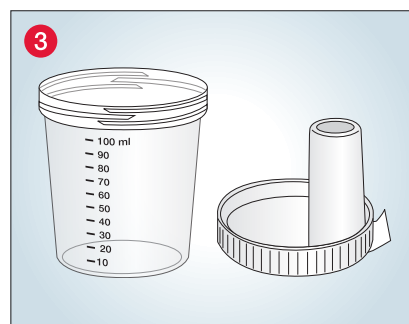
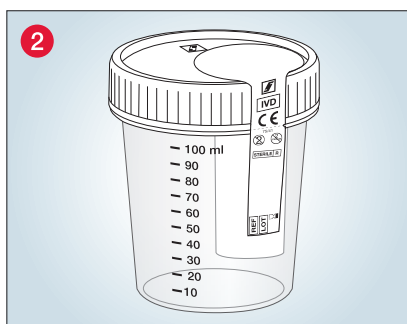


Instructions de manipulation

Recueil des urines avec le pot NFT sans aiguille

Instructions pour les patients

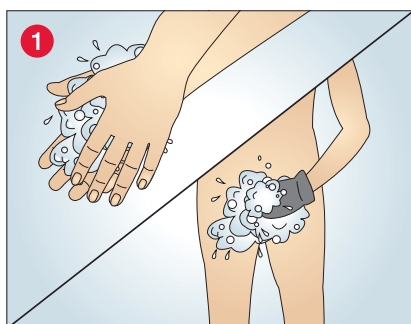

- 1 Nettoyez soigneusement vos mains, puis la zone génitale, selon le protocole en vigueur dans votre établissement.
- 2 Assurez-vous que l'étiquette de sécurité n'est pas déchirée.
- 3 Ouvrez ensuite le couvercle du pot à urine NFT en le tournant dans le sens antihoraire. Retournez le couvercle et déposez le à plat dans un endroit hygiénique. Assurez-vous que l'intérieur du couvercle n'est pas contaminé.
- 4 Déposez d'abord une petite quantité d'urine dans les toilettes (ill. 4a), puis, sans interrompre le jet, recueillez l'urine de milieu de jet dans le gobelet à urine NFT (ill. 4b). Ensuite, videz complètement votre vessie dans les toilettes (ill. 4c).
- 5 Fermez correctement le couvercle du pot à urine NFT en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ne pas contaminer l'intérieur du couvercle. Marquez votre nom sur le pot à urine NFT et remettez immédiatement le pot bien fermé avec l'échantillon à la personne compétente ou suivez les instructions de votre médecin.