
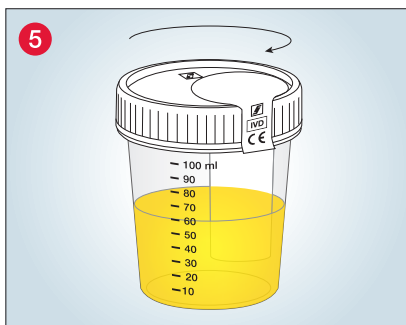
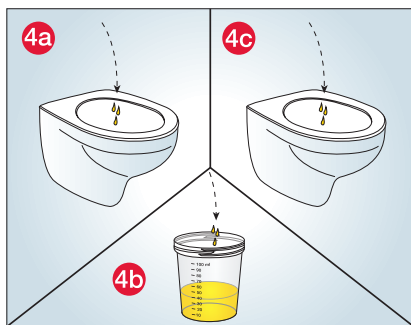
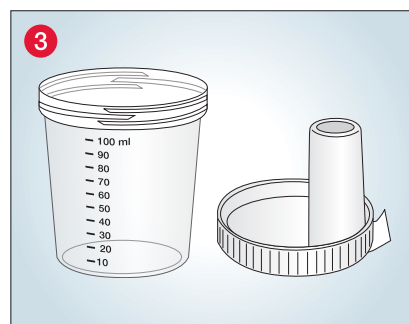
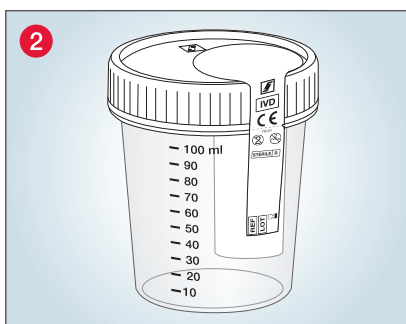


Instruções de manuseamento

Recolha do jacto intermédio de urina com o copo de urina NFT

Instruções para os pacientes

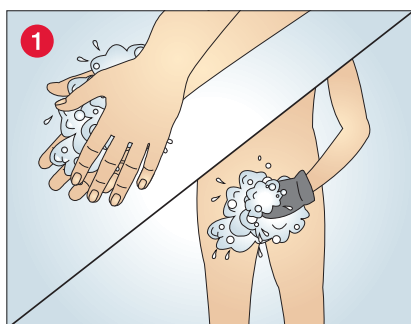

- 1 Lave bem as mãos e, a seguir, a zona dos genitais. Seque-se com uma toalha limpa.
- 2 Assegure-se de que a etiqueta de segurança não está danificada.
- 3 A seguir, abra a tampa do copo de urina NFT, rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Pouse a tampa num local higienizado. Certifique-se de que o interior da tampa não é contaminado.
- 4 Primeiro, liberte uma pequena quantidade de urina na sanita (Fig. 4b) e, a seguir, sem interromper o fluxo de urina, recolha a urina a meio do fluxo para dentro do copo de urina NFT (Fig. 4a). De seguida, esvazie completamente a bexiga na sanita (Fig. 4c).
- 5 Feche bem a tampa do copo de urina NFT, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio. Tenha atenção para não contaminar o interior da tampa. Identifique o copo de urina NFT com o seu nome e entregue-o imediatamente bem fechado com a amostra à pessoa responsável, ou proceda de acordo com as instruções do seu médico.