
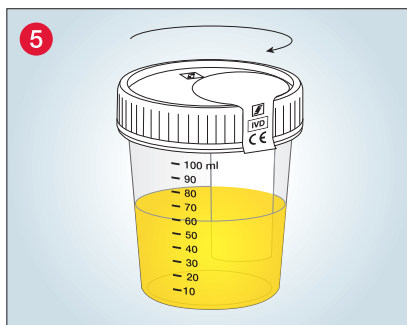
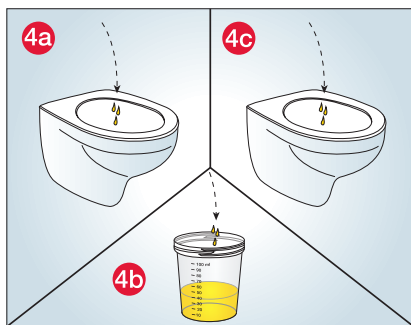
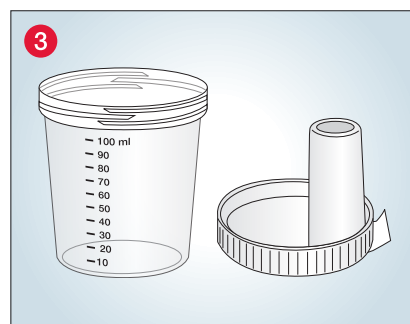
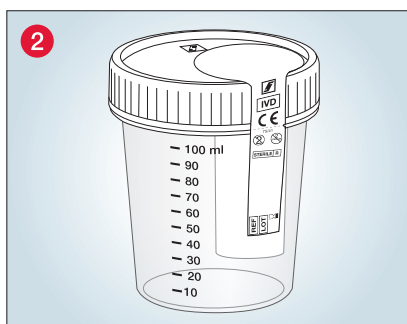


Instrukcja obsługi

Zbieranie moczu ze środkowego strumienia przy użyciu pojemnika na mocz NFT

Instrukcja dla pacjenta

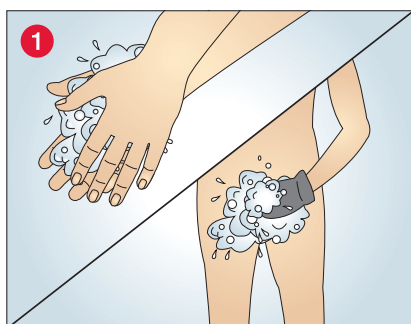

- 1 Dokładnie umyć ręce, a następnie okolice narządów płciowych. Osuszyć czystym ręcznikiem.
- 2 Upewnić się, że etykieta zabezpieczająca jest nienaruszona.
- 3 Otworzyć zakrętkę pojemnika na mocz NFT, przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Położyć zakrętkę w higienicznie czystym miejscu. Zadbać o to, aby wewnątrz zakrętki nie zostało zanieczyszczone.
- 4 Oddać niewielką ilość moczu do toalety (rys. 4b), a następnie, nie przerywając strumienia, zebrać ze środkowego strumienia mocz do pojemnika NFT (rys. 4b). Do końca opróżnić pęcherz, oddając mocz do toalety (rys. 4c).
- 5 Zamknąć szczelnie pojemnik na mocz NFT zakrętką, przekręcając ją w prawo. Uważać przy tym, aby nie zanieczyścić wewnętrznej strony zakrętki. Opisać pojemnik na mocz NFT imieniem i nazwiskiem i natychmiast przekazać szczelnie zamknięty pojemnik NFT z próbką właściwej osobie lub podstępować zgodnie z instrukcjami personelu medycznego.