


Produktinformation S-Monovette® Serum

Um eine bessere Serum-Ausbeute zu erzielen, nach der Blutentnahme mit der S-Monovette® Serum unbedingt beachten:

1.

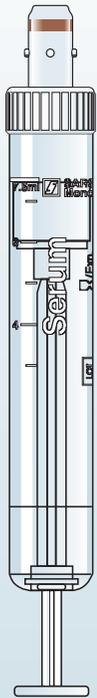


7,5 ml
Art.-Nr.: 01.1601




Nach der Blutentnahme:
S-Monovetten **30 min. stehend lagern**

30 min.
Stehend gerinnen lassen

2.

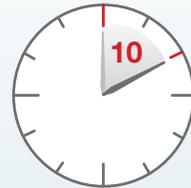

Zentrifugationsbedingungen im "swing-out rotor":
10 min. ▶ 2.000 x g ▶ 20 °C
 $g = 1,12 \times 10^{-5} \times r \times (\text{rpm})^2$

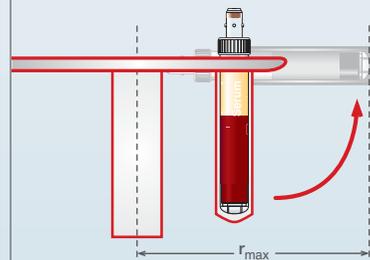

10 min.
Zentrifugieren

3.



Ergebnis bei einer liegenden Lagerung nach der Blutentnahme:



Während der Gerinnungsphase (die ersten 30 min. nach der Blutentnahme) müssen die S-Monovetten unbedingt stehend gelagert werden, da es sonst nach Zentrifugation nicht zu einer sauberen Trennschicht sondern zu einer "Wurstbildung" kommt!


SARSTEDT AG & Co.
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon (+49) 0 22 93 305-0
Telefax (+49) 0 22 93 305-282
☎ **Service 0800 (Deutschland)**
Telefon (0800) 0 83 305-0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**

Produktinformation S-Monovette® Serum-Gel

Um eine bessere Serum-Ausbeute zu erzielen, nach der Blutentnahme mit der S-Monovette® Serum-Gel unbedingt beachten:

1.

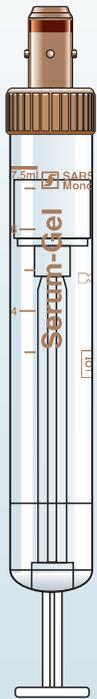

7,5 ml
Art.-Nr.: 01.1602




30 min.
Stehend gerinnen lassen




Nach der Blutentnahme:
S-Monovetten **30 min. stehend lagern**

2.

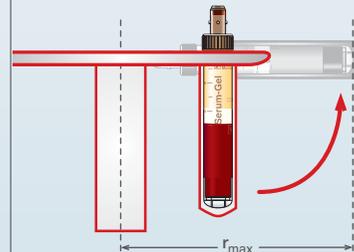


Zentrifugationsbedingungen im "swing-out rotor":
10 min. ▶ 2.500 x g ▶ 20 °C
 $g = 1,12 \times 10^{-5} \times r \times (\text{rpm})^2$

10 min.
Zentrifugieren

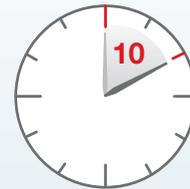

3.

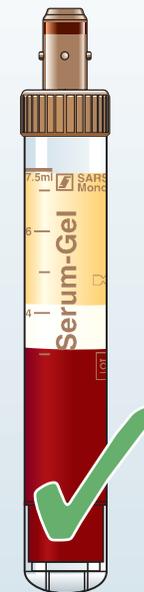

Ergebnis bei einer liegenden Lagerung nach der Blutentnahme:



Während der Gerinnungsphase (die ersten 30 min. nach der Blutentnahme) müssen die S-Monovetten unbedingt stehend gelagert werden, da es sonst nach Zentrifugation nicht zu einer sauberen Trennschicht sondern zu einer "Wurstbildung" kommt!

SARSTEDT AG & Co.
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon (+49) 0 22 93 305-0
Telefax (+49) 0 22 93 305-282
Service 0800 (Deutschland)
Telefon (0800) 0 83 305-0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**